

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開創器(13380000)

Salvin 開創器

【形状・構造及び原理等】

(Salvin Dental Specialties, LLC)

1.形状

MISCH-RAMUS-R

MISCH-RAMUS-L



2.寸法

カタログ番号	カタログ名	全長 (cm)
MISCH-RAMUS-R	Misch レイマス リトラクター ライト	21
MISCH-RAMUS-L	Misch レイマス リトラクター レフト	21

3.組成

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手術時に可視性及び到達性を向上させるため、軟組織を移動し、保護するために用いる。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- 本品によりレイマス部の軟組織を後退させ、軟組織を保護し開創部の術野を確保する。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、劣化を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
- 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を劣化させる恐れがあるので使用しないこと。
- 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸 入 先 国 :アメリカ合衆国
輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシャルティーズ社