

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用カーバイドバー(16668000)

## Salvin 歯科用カーバイドバー

### 【形状・構造及び原理等】

(Salvin Dental Specialties, LLC)

#### 1.形状

PIKOS-SCORINGBUR



PIKOS-OSTEO-BUR-S



#### 2.寸法

カタログ番号	カタログ名	マーク深さ(mm)
PIKOS-SCORINGBUR	ラウンドバーHP #8 44 mm	15
PIKOS-OSTEO-BUR-S	オステオトミーバーHP702 44 mm	

#### 3.組成

ステンレス鋼

タングステンカーバイド

### 【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部で骨等の硬組織を研削するために用いる。

### 【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。  
推奨滅菌条件:121℃ 20分間  
134℃ 5分間
2. 歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して、保管する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、劣化を起こす恐れがあるので使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を劣化させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インブラテックス  
ホームページ:<http://www.itx.co.jp>  
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :アメリカ合衆国

輸入先製造業者:サルビンデンタルスペシャルティーズ社