

再使用禁止

MEIS 歯科用ダイヤモンドソーディスク

**【禁忌・禁止】

再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状

7407150




58231DC204070



58231DC204100



58231DC204130

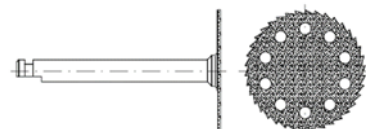

**2.寸法

MEIS ダイヤモンドソーディスク/ペーシックキット (7407150)

カタログ番号	カタログ名	先端直径 (mm)
58231DC204070	MEIS ダイヤモンドソーディスク φ 7mm	7.0
58231DC204100	MEIS ダイヤモンドソーディスク φ 10mm	10.0
58231DC204130	MEIS ダイヤモンドソーディスク φ 13mm	13.0

**3.組成

ステンレス鋼
ダイヤモンド

【使用目的又は効果】

本品は、微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具である。金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いることもある。

**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

2. 必要サイズのバーを選択し、切削を行う。

**【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限

にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。

- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

**【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ
輸入先製造業者: ハガーアンドマイジンガー社
(Hager & Meisinger GmbH)