

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子(70683000)
歯科用歯肉はさみ(31822000)/ 歯科用ダイヤモンドバー(16670000)/ 歯科用カーバイドバー(16668000)

再使用禁止

エクスターナルリフトコントロール

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

※【形状・構造及び原理等】

*1.形状
79BTL00



※5000801204023, 5000801204027, 5000801204033



200001S204023, 200001S204027, 200001S205023



※2.構成品

エクスターナルリフトコントロール (79BTL00)

カタログ番号	カタログ名	全長(mm)
3900TL1	サイナスリフトインストルメント TL1	173

3900TL2	サイナスリフトインストルメント TL2	173
3900TL3	サイナスリフトインストルメント TL3	172
3900TL4	サイナスリフトインストルメント TL4	174
3900TL5	サイナスリフトインストルメント TL5	175
3900TL6	サイナスリフトインストルメント TL6	175
3900TL7	メンブレンインストルメント TL7	170
3900TL8	コンデンサー TL8	181

カタログ番号	カタログ名	全長(mm)	届出番号
3900TL9	シサー TL9	116	13B1X00053V00024

カタログ番号	カタログ名	刃部最大径(mm)	届出番号
5000801204023 ※	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ 2.3/22mmL	2.3	13B1X00053 V00046
5000801204027 ※	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ 2.7/22mmL	2.7	
5000801204033 ※	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ 3.3/22mmL	3.3	
200001S204023	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.3/22mmL	2.3	13B1X00053 V00043
200001S204027	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.7/22mmL	2.7	
200001S205023	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.3/26mmL	2.3	

※単回使用

- 3.組成
- ステンレス鋼
 - ダイヤモンド
 - タングステンカーバイド

【使用目的又は効果】

本品は、粘膜等の剥離に用いる器具であり、開窓した上顎骨側方の粘膜を剥離することによって上顎洞底を挙上するシステムである。

【使用方法等】

- 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間
- ダイヤモンドヘッドバー又はタングステンカーバイドバーを用いて、上顎洞側壁の骨に孔を形成する。
- サイナスリフトインストルメントで上顎洞粘膜を剥離した後、コンデンサーを用いて骨を移植する。
- 術部にメンブレンを固定し、上顎骨の造成を待つ。
- 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。但し、ダイヤモンドヘッドバーはディスプレイ製品のため、再滅菌して使用しないこと。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

バー使用の際は下記に注意すること。

- 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

- 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
- 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検すること。
7. 強アルカリ／強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : ドイツ
輸入先製造業者: ハガーアンドマイジンガー社
(Hager & Meisinger GmbH)