

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
 一般医療機器 歯科用カーバイドバー(16668000)

MEIS サージカルカーバイドバー

【形状・構造及び原理等】

1.形状

290254E205012



21033IL205010



23033IL316010



23034IL317012



210031C204012



230033C314012



2001SQL204012



290141A205035, 290141A206031



200001S204023, 200001S204027, 200001S205023



2.寸法

カタログ番号	カタログ名	刃部最大径(mm)
290254E205012	MEIS サージカルカッター φ 1.2mm	1.2
21033IL205010	MEIS オステオトミーカーバイドバー φ 1.0mm	1.0
23033IL316010	MEIS オステオトミーカーバイドバーFG φ 1.0mm	1.0
23034IL317012	MEIS オステオトミーカーバイドバーFG φ 1.2mm	1.2
210031C204012	MEIS クラウンカッターCA φ 1.2mm	1.2
230033C314012	MEIS クラウンカッターFG φ 1.2mm	1.2
2001SQL204012	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 1.2mm	1.2
290141A205035	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 3.5/26mmL	3.5
290141A206031	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 3.1/34mmL	3.1
200001S204023	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.3/22mmL	2.3
200001S204027	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.7/22mmL	2.7
200001S205023	MEIS タングステンカーバイドバーCA φ 2.3/26mmL	2.3

3.組成

ステンレス鋼
 カーバイド

【使用目的又は効果】

本品はタングステンカーバイド製の作業部をもつ回転式の研削器具であり、歯科用ハンドピースに装着し、骨等の硬組織を研削するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担

保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。

推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
 134℃ 5分間

2. 本品を歯科用ハンドピースに接続し、適切な速度で回転させ骨を穿孔する。
3. 使用後は、速やかに血液、体液等を水洗し、その後、オートクレーブ等にて滅菌して保管する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に適さない場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、金属腐食を起こす恐れがあるので使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・消毒すること。可動部分等は、開放し汚れを残留させないこと。
2. 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 超音波洗浄器等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、出来るだけ精製水を用いること。
5. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
6. 使用(滅菌)前に汚れ、傷、曲がり、刃の損傷等の異常がないか点検をすること。
7. 強アルカリ/強酸性洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
8. 洗浄の際、クレンザー(磨き粉)や金属たわしを使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
 ホームページ:http://www.itx.co.jp
 TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505

輸入先国 :ドイツ
 輸入先製造業者:ハガーアンドマイジンガー社
 (Hager & Meisinger GmbH)