

再使用禁止

MEIS サージカルダイヤモンドバー

*【禁忌・禁止】

再使用禁止(バーブロックを除く)。

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

500859L204010



5000859204018



5000801204023, 5000801204027, 5000801204033



50801LD206010



50801LD206025



50801LD206030



50801LD206035



74DEG00



*2.寸法

カタログ番号	カタログ名	刃部最大径(mm)
500859L204010	MEIS オステオトミーバー φ1.0mm	1.0
5000859204018	MEIS オステオトミーバー φ1.8mm	1.8
5000801204023	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ2.3/22mmL	2.3
5000801204027	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ2.7/22mmL	2.7
5000801204033	MEIS ダイヤモンドヘッドバー φ3.3/22mmL	3.3
50801LD206010	MEIS デグラニュレーションバー φ1.0mm	1.0
50801LD206025	MEIS デグラニュレーションバー φ2.5mm	2.5
50801LD206030	MEIS デグラニュレーションバー φ3.0mm	3.0
50801LD206035	MEIS デグラニュレーションバー φ3.5mm	3.5
74DEG00	MEIS デグラニュレーションバー キット	

MEIS デグラニュレーションバー キット(74DEG00)

カタログ番号	カタログ名
50801LD206010	MEIS デグラニュレーションバー φ1.0mm
50801LD206025	MEIS デグラニュレーションバー φ2.5mm
50801LD206030	MEIS デグラニュレーションバー φ3.0mm
50801LD206035	MEIS デグラニュレーションバー φ3.5mm
07BS441 ※	MEIS バーブロック BS441 8穴

※雑品

3.組成

ステンレス鋼
ダイヤモンド

【使用目的又は効果】

本品は、微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部で歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件: 121℃ 20分間
134℃ 5分間
2. 本品を歯科用ハンドピースに接続し、適切な速度で回転させ骨又は歯牙等を穿孔する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は使用前に芯ぶれなどに支障のないことを確認すること。使用に不適な場合には新品と交換すること。
- 2) 本品は使用の際、発熱、外科的損傷など組織への侵襲を最小限にするため、十分な生理食塩水の注水下で適正に使用すること。
- 3) 本品を使用中に切削力が低下したり、汚染したりした恐れのある場合には直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL:03-5850-8555 FAX:03-5850-8505
輸入先国 :ドイツ
輸入先製造業者:ハガーアンドマイジンガー社
(Hager & Meisinger GmbH)