

再使用禁止


SV プレジジョントランスファー

【禁忌・禁止】 再使用禁止

推奨滅菌条件: 121℃ 20 分間
134℃ 5 分間

*【形状・構造及び原理等】

*1.形状

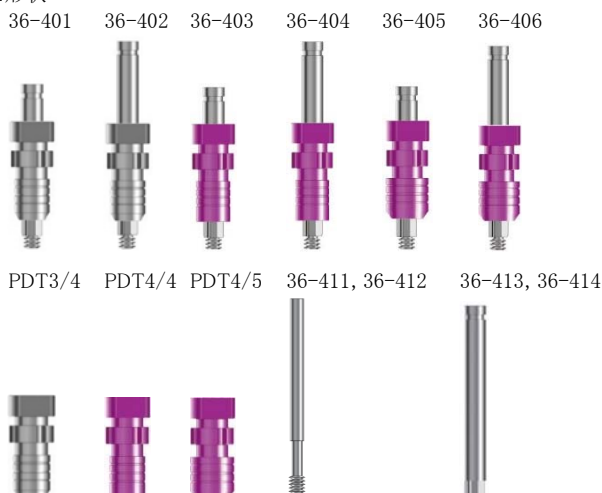

*2.構成品

カタログ 番号	カタログ名	プラットフォーム 径(mm)	フレア径 (mm)
36-401	PDT3/4S プレジジョン トランスファー3/4S	3.5	4.8
36-402	PDT3/4L プレジジョン トランスファー3/4L	3.5	4.8
36-403	PDT4/4S プレジジョン トランスファー4/4S	4.5	4.5
36-404	PDT4/4L プレジジョン トランスファー4/4L	4.5	4.5
36-405	PDT4/5S プレジジョン トランスファー4/5S	4.5	5.5
36-406	PDT4/5L プレジジョン トランスファー4/5L	4.5	5.5
PDT3/4	PDT3/4 プレジジョン トランスファー3/4 本体	3.5	4.8
PDT4/4	PDT4/4 プレジジョン トランスファー4/4 本体	4.5	4.5
PDT4/5	PDT4/5 プレジジョン トランスファー4/5 本体	4.5	5.5

カタログ 番号	カタログ名	全長 (mm)
36-411	PDTSCS プレジジョントランスファースクリューS	19
36-412	PDTSCL プレジジョントランスファースクリューL	24
36-413	PDTSSL プレジジョントランスファースリーブ S	19
36-414	PDTSSL プレジジョントランスファースリーブ L	24
36-415	PDTSSS プレジジョントランスファースリーブスクリュー セット S(構成品:36-411, 36-413)	—
36-416	PDTSSL プレジジョントランスファースリーブスクリュー セット L(構成品:36-412, 36-414)	—

3.組成
ステンレス鋼、チタン合金


【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために、模型作製前の印象採得に使用する器具である。


**【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件にて高圧蒸気滅菌を行うこと。


2. 口腔内のインプラントにプレジジョントランスファーを締結する。

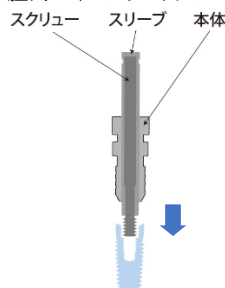

3. ダイレクト法（オーブントレー式）にて印象採得を行い、印象材硬化後にスクリューを緩めて抜き取る。

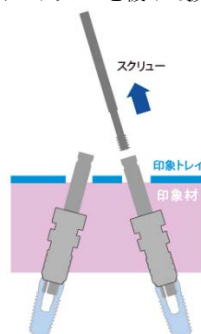

4. 次にスリーブをトランスファー本体から抜き取り、インプラントとトランスファーにヘックスの干渉が無い状態にして、印象を取り外す。

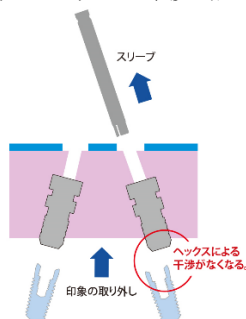

5. 通法に従い、アナログ模型を作製する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。
3. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
4. 本品の使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505
製造業者 : 株式会社 YDM 埼玉事業部