

医療用品 03 手術用手袋および指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ナビロール医療ニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ニトリルゴム）製、左右兼用、未滅菌、パウダー（潤剤）の付いていない検査・検診用使い捨て手袋である。

＜仕様＞

検査項目	老化前	老化後
引張強さ（MPa）	14	14
切断時伸び（％）	500	400

全長：約 240mm

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

【使用方法等】

包装箱より手袋を取り出し、丁寧に手に装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・使用前、使用中には、手袋にひび割れ、ピンホール、破れなどがないことを必ず確かめ、異常が認められる場合は使用しないこと
 - ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合は、使用を中止すること
2. 重要な基本的注意
 - ・爪先、刃物等、とがった物に接触すると、破れや穴があくことがあるので注意すること
 - ・液体が付着すると滑りやすくなるので注意すること
 - ・使用後は感染防止に留意し、適切な方法で処分すること
3. 相互作用
 - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤、浸透、変質する場合があるので確認の上、使用すること

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・水ぬれに注意すること
 - ・高温、多湿、紫外線の影響で品質が劣化するので、直射日光、蛍光灯が当たる場所、コピー機などの OA 機器周囲を避け、風通しの良い涼しい場所で貯蔵、保管すること

2. 有効期間

**製造後 5 年[自己認証（製造元データ）による]
使用期限は包装箱に記載する（包装箱裏面）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

*製造業者 Sri Trang Gloves (Thailand) Public Co., Ltd.

（スリ トラン グローブズ パブリック社）

製造国名 タイ