

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (16779000)

コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

2. 有効期間

内箱の有効期限欄を参照のこと。
[自己認証（当社データ）による]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

＜代表的写真＞



本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

2. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】

本品は吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のある滅菌済のプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 接続する各種機器類やチューブの径、及び必要な距離を確認し、対応した本品を選択する。
- 2) 滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 3) 使用する機器にしっかりと接続する。

2. 使用方法に関する使用上の注意

コネクティングチューブが閉塞しないように、過度に折り曲げたり踏みつけたりしないこと。

【使用上の注意】

1. 本品をチューブ（コネクター）、吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続するとき、緩みが無いことを確認し、確実に接続すること。
2. 包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. ある程度の練り込み（黒い点）は発生するが、性能上影響は無い。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、高温又は湿度の高い場所、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Well Lead Medical Co., Ltd.

製造国名 中華人民共和国