

弾性ストッキング

【警告】

1. 適用対象（次の患者には慎重に適用してください。）

- 急性期の深部静脈血栓症の患者
[肺血栓閉塞症を発症するおそれがあります]
- 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者
[圧迫により症状を悪化させるおそれがあります]
- 急性循環不全症等、末梢循環が不安定な患者
[血流量低下により壊死が起こる可能性があります]
- 糖尿病患者
[血行障害や神経障害が発症するおそれがあります]
- 装着部位に神経障害のある患者
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあります]
- 装着部位に極度の変形を有する患者
[適切な圧迫圧が得られないおそれがあります]
- 繊維に対して過敏症のある患者
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあります]

2. 使用方法

- 医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないでください。
[臥位になることで静脈還流などに変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあります]

【禁忌・禁止】（次の患者には適用しないこと）

- 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため]
- 化膿性静脈炎の患者
[菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあります]

【形状・構造及び原理等】

本品の種類・規格・材質などは以下のとおりです。

1. 種類・規格

1) ハイソックス

つま先	サイズ	周囲径（cm）	
		足首	ふくらはぎ
クローズトゥ	S	19～21	29～34
	M	21～23	33～37
	L	23～25	36～41
	LL	25～27	40～45
オープントゥ	S	19～21	29～34
	M	21～23	33～37
	L	23～25	36～41
	LL	25～27	40～45

材質：ナイロン、ポリウレタン

2) ストッキング

つま先	サイズ	周囲径（cm）		
		足首	ふくらはぎ	大腿
クローズトゥ	S	19～21	29～34	38～45
	M	21～23	33～37	44～49
	L	23～25	36～41	48～53
	LL	25～27	40～45	52～57
オープントゥ	S	19～21	29～34	38～45
	M	21～23	33～37	44～49
	L	23～25	36～41	48～53
	LL	25～27	40～45	52～57


材質：ナイロン、ポリウレタン

3) パンティーストッキング

つま先	サイズ	周囲径（cm）		
		足首	ふくらはぎ	大腿
クローズトゥ	S	19～21	29～34	38～45
	M	21～23	33～37	44～49
	L	23～25	36～41	48～53
	LL	25～27	40～45	52～57
オープントゥ	S	19～21	29～34	38～45
	M	21～23	33～37	44～49
	L	23～25	36～41	48～53
	LL	25～27	40～45	52～57

材質：ナイロン、ポリウレタン

（参考）測定箇所

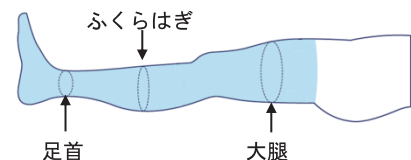

2. 構造

1) ハイソックス

つま先	足首圧力	模式図
クローズトゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	
オープントゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	

2) ストッキング

つま先	足首圧力	模式図
クローズトゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	
オープントゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	

3) パンティーストッキング

つま先	足首圧力	模式図
クローズトゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	
オープントゥ	20～27hPa (15～20mmHg)	

3. 原理

本品は、構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かって漸減的に圧迫を加えます。

【使用目的又は効果】

本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有します。

【使用方法等】

1. 形状及びサイズの選定

- 1) 圧迫する目的、部位に適した形状（ハイソックス・ストッキング・パンティーストッキング）を選びます。
- 2) 足首及びふくらはぎの周囲径を測定し、サイズを選びます。

2. 装着方法

- 1) ストッキングに片手を入れ、かかと部分をつまみます。
- 2) かかと部分をつまんだまま手を引き抜き、つま先部分をストッキングの中に残した状態で裏返します。
- 3) 裏返したストッキングにつま先を入れ、かかとを合わせるようにストッキングを履きます。
- 4)十分に伸ばしながら少しずつたくし上げ、たるみやしわ、よじれが無いことを確認します。
- 5) 全体的にしわが無く、かかとが正しい位置に収まっていることを確認し、長さを調整します。

3. 装着後（装着中）の確認

- 1) つま先及びかかとが正しい位置に収まっていることを確認します。
- 2) たるみやしわ、よじれが無いことを確認し、必要に応じて適時修正を行います。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用してください）＞

- 1) 術後など患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には、患者の状態をよく観察して使用してください。
- 2) ギプス、外傷などによる長時間の下肢不動状態の患者
〔潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があります〕

＜重要な基本的注意＞

- 1) 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず測定し、正しいサイズを選択してください。また、サイズ適応外の場合には使用しないでください。
- 2) 本品を折り返して使用しないでください。
〔血行障害や神経障害などを引き起こすおそれがあります〕
- 3) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないよう装着してください。装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおしてください。
〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあります〕
- 4) 腫脹の軽減などにより装着中に各部位の周径が変わった場合は適切なサイズに変更してください。
- 5) 本品に破損（伝線、ほつれ、破れなど）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
- 6) 本品は繊維製品のため、次のような場合は破損（伝線、ほつれ、破れなど）する場合がありますので注意してください。
① 少しずつ引き上げず、強く引っ張りあげての装着
② 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
③ 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
④ 鋭利なものへの接触
- 7) 本品をはさみで切るなどの加工、修理を行わないでください。
- 8) 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。
- 9) 1日に数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。ま

た、1日1回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。

- 10) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤などが付着すると繊維が劣化しますので、付着しないよう注意してください。
- 11) 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
- 12) 本品の他に圧迫圧のあるストッキングなどを重ねて装着させる場合には、ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。
- 13) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれなどの異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害などを発症するおそれがあります〕

＜不具合・有害事象＞

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。

1. 重大な有害事象

- 1) 血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感など、血行障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
 - 2) 神経障害
腓骨神経麻痺などの神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
 - 3) 皮膚障害
・本品のずれ、圧迫などにより、皮膚潰瘍などの皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
・ショックなど、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。
2. その他の有害事象
本品の装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に医師にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗濯をする場合、熱湯、漂白剤、消毒剤、アイロン、乾燥機、ドライクリーニングの使用は、繊維を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。
- 2) むるま湯に洗剤を溶かし、手洗いしてください。
- 3) 直射日光を避け、陰干ししてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Da Yu Enterprise Co., Ltd

ダーユー エンタープライズ社

製造国名 台湾