医療用品 03 手術用手袋及び指サック 一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

抗菌性ニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌·禁止】

·再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム (ニトリルゴム) 製、左右兼用、未滅菌、パウダー (潤剤) の付いていない検査・検診用使い捨て手袋である。

本品は、手袋を介して他の媒体に細菌が伝播するリスクを低減することを期待して、手袋表面に光増感剤を付与し、 生成された一重項酸素による抗菌機能を有する製品である。 ただし、臨床において、本品を用いることで感染症のリス クが低下された等のデータは確認されていない。

<仕様>

ASTM D6319 に準拠

検査項目	老化前	老化後
引張強さ(MPa)	1 8	1 6
切断時伸び(%)	500	400

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

包装箱より手袋を取り出し、丁寧に手に装着し使用する。 抗菌機能を発揮させる場合は照度 5001x 以上の環境下で使 用する。

【使用上の注意】

- 1. 使用注意
 - ・使用前、使用中には、手袋にひび割れ、ピンホール、 破れなどがないことを必ず確かめ、異常が認められる 場合は使用しないこと。
 - ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合は、使用 を中止すること。
- 2. 重要な基本的注意
 - ・爪先、刃物等、とがった物に接触すると、破れや穴が あくことがあるので注意すること。
 - ・液体が付着すると滑りやすくなるので注意すること。
 - ・使用後は感染防止に留意し、適切な方法で処分すること。
- 3. 相互作用
 - ・薬品、溶剤等によっては、膨潤、浸透、変質する場合 があるので確認の上、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水ぬれに注意すること
- ・高温、多湿、紫外線の影響で品質が劣化するので、 直射日光、蛍光灯が当たる場所、コピー機などの OA 機器周囲を避け、風通しの良い涼しい場所で貯蔵、 保管すること。

2. 有効期間

製造後3年[自己認証(製造元データ)による] 使用期限は包装箱に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者

アズワン株式会社

TEL: 0120-711-875

受付時間:平日9:00~17:30(土日祝·弊社休業

日は除く)

製造業者 Hartalega NGC Sdn. Bhd.

ハルタレガ社

製造国名 マレーシア