

*2022 年 8 月（第 2 版）
2019 年 7 月（第 1 版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (JMDN コード:31776000)

再使用禁止


デイスポ歯鏡

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- *・再滅菌禁止
- ・本品の樹脂成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

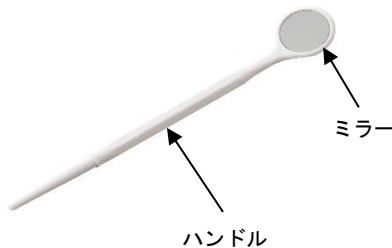

＜原材料・材質＞

- ・ミラー：PC(ポリカーボネート)
- ・ハンドル：ABS 樹脂

＜原理＞

ハンドルを握ってミラー部に対象部位を反射させることにより、対象部位の状態を診査・確認を行う。

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法等】

- 1) 本製品は滅菌済みのため、滅菌袋を開封してから使用する。
- 2) 本製品を患者の口腔内に入れ、診察・診療し口腔内の状態確認に使用する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・小児等、診察・診療時において本製品を噛む恐れがある場合、安全性を確保する為、開口器などを用いて開口状態を保持し、本製品の破損・誤飲がないように注意すること
- *・包装が破損、汚染している場合や、製品に破損・表面が滑らかでない等の異常が認められる場合は使用しないこと。

＜その他の注意＞

- ・本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又は、アレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- ・破損等の恐れがあるため、以下は行わないこと。
 - ① 本製品に対する曲げ・切削・加圧等
 - ② 粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
- ・薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるため速やかに清拭すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように適切に保管・管理すること。

＜有効期限＞

滅菌後 3 年間 (EOG 滅菌)。
有効期限は商品ラベルに記載する。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項(日常点検)＞

- 1) 使用前に以下について点検すること。
 - ・本製品全体の外観に破損、ヒビ、キズ、ミラー部の曇り、腐食及び劣化等の異状等がないかを確認すること。
 - ・外観以外の機能の低下はないか確認すること。
- 2) 本製品及び破折片等の誤飲に注意を払うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD

（チャイナ サージカル ドレッシングセンター社）

製造国名 台湾