

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 呼吸ガス混合器 36327009


## ティップスヘイラー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

本品は、本体、バルブホルダー（マウスピース）、背面コネクタ、呼気バルブ、吸気バルブ、バルブキャップ、マスクから構成される。（マスクが付属しない場合もある。）

#### 2. 外観（代表例）

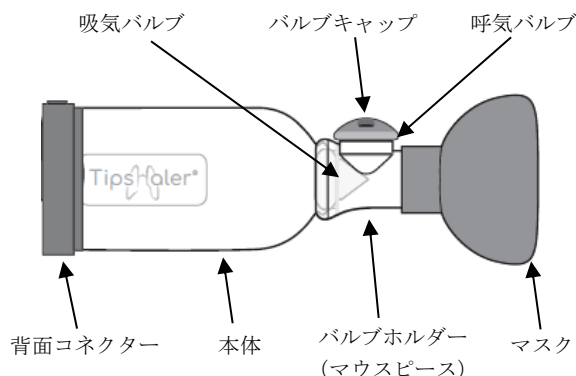

#### 3. 原理

背面コネクタに定量噴霧式吸入器（MDI）を取り付け、本体内部にエアロゾル状の薬液を噴霧すると、薬液が本体内部で拡散し、マスク又はマウスピースを通して使用者が拡散した薬液を吸入する。

### 【使用目的又は効果】

液体の医薬品をエアロゾルとして患者が吸入する空気の中に噴霧するために用いる機器をいう。通常、手で操作する。ネブライザーとは異なり、本品にはパッフルがないため、エアロゾルの粒子径が一定ではない。

### 【使用方法等】

- (1) 製品内部に損傷又は異物が無いことを確認する。異物があった場合は取り除く。
- (2) MDI 製剤の取扱説明書に従ってよく振ってからキャップを外し、背面コネクタに取り付ける。
- (3) マスクを、鼻と口を覆うように密着させる。マスクのない商品の場合は、マウスピースを口にくわえる。
- (4) MDI 製剤の取扱説明書に従い、本体内に薬液を 1 回噴霧する。
- (5) ゆっくりと息を吸い込み、数秒間止めてからゆっくりと吐き出す。
- (6) 医師から 2 回以上 MDI 製剤の吸入を指示されている場合は、必要に応じて上記の手順を繰り返す。

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

- ・ 乳幼児や小児及び介助を必要とする方が使用する場合は、必ず保護者や介助者が付き添うこと。[誤使用やけがをするおそれがあるため]
- ・ 本品は 1 人の患者のみに使用すること。[本品は滅菌できない]
- ・ 本品を幼児の手の届く場所に置かないこと。[誤飲やけがの恐れがある]

#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・ 本品を初めて使用する際には、清潔な水で洗浄し乾燥させてから使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿、ほこりを避けて保管すること。

#### 2. 使用期間

1 年[自己認証（当社データ）による]

### 【保守・点検に係る事項】

#### ＜洗浄方法＞

1. 本品を煮沸消毒や蒸気滅菌、食洗機等で洗浄しないこと。
2. 本品は、1 週間に 1 度、以下の方法で洗浄すること。
  - (1) 取扱説明書に従って各部品を取り外して食器用洗剤を数滴加えたぬるま湯で振り洗いし、5 分程度浸す。
  - (2) 清潔な水で洗剤を洗い流して水分をよく振り落とし、自然乾燥させる。
  - (3) 各部品が完全に乾燥したことを確認し、取扱説明書に従って組み立てる。

#### ＜点検＞

1. 使用前に各部品が正しく取り付けられているか確認すること。
2. 使用前に、本品の各部品に破損、変形、変色等の異常がないか確認すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

#### 製造業者

OptimHal-ProtecSom SAS

オブティマル プロテックサム社

製造国名 フランス

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。