

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

ナビス 弾性ストッキング

【警告】

＜適用対象（患者）＞

- ・次の患者には慎重に適用すること。
 - 1) 急性期の深部静脈血栓症の患者
[肺血栓閉塞症を発症するおそれがあるため。]
 - 2) 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者
[圧迫により症状を悪化させるおそれがあるため。]
 - 3) 急性循環不全症等、末梢循環が不安定な患者
[血流量低下により壊死が起こる可能性があるため。]
 - 4) 糖尿病患者
[血行障害や神経障害が発症するおそれがあるため。]
 - 5) 装着部位に神経障害のある患者
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。]
 - 6) 装着部位に極度の変形を有する患者
[適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。]
 - 7) 繊維に対して過敏症のある患者
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

＜使用方法＞

- ・医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
[臥位になることで静脈還流などに変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫がかかるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

＜適用対象（患者）＞

- 1) 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 2) 化膿性静脈炎の患者
[菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

1) ハイソックス

つま先	サイズ	周囲径 (cm)	
		足首	ふくらはぎ
クローズトゥ	S	20～23	30～36
	M	23～26	34～40
	L	26～29	38～44
	LL	29～32	42～48
オープントゥ	S	20～23	30～36
	M	23～26	34～40
	L	26～29	38～44
	LL	29～32	42～48


2) ストッキング

つま先	サイズ	周囲径 (cm)		
		足首	ふくらはぎ	太腿
クローズトゥ	S	20～23	30～36	44～55
	M	23～26	34～40	50～61
	L	26～29	38～44	56～68
	LL	29～32	42～48	62～70
オープントゥ	S	20～23	30～36	44～55
	M	23～26	34～40	50～61
	L	26～29	38～44	56～68
	LL	29～32	42～48	62～70

3) パンティストッキング

つま先	サイズ	周囲径 (cm)		
		足首	ふくらはぎ	太腿
クローズトゥ	S	20～23	30～36	44～55
	M	23～26	34～40	50～61
	L	26～29	38～44	56～68
	LL	29～32	42～48	62～70

（参考）測定箇所

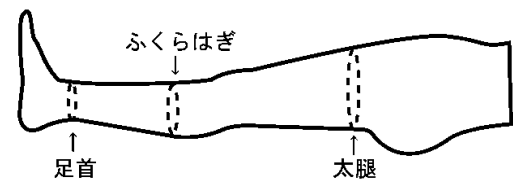

2. 仕様

足首圧力：15～20 mmHg (20～27 hPa)

3. 構造

種類	参照図	種類	参照図
ハイソックス (クローズ トゥ)		ハイソックス (オープン トゥ)	
ストッキング (クローズ トゥ)		ストッキング (オープン トゥ)	
パンティ ストッキング (クローズ トゥ)			

4. 材質

ナイロン、スパandex (ポリウレタン)

5. 原理

本品は、構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かって漸減的に圧迫を加える。

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

〔形状及びサイズの選定〕

1. 圧迫する目的や部位に適した形状（ハイソックス・ストッキング・パンティストッキング）を選ぶ。
2. 各部位の周囲径を測定し、サイズを選ぶ。

〔装着方法〕

1. 本品に片手を入れ、かかと部分をつまむ。
2. かかと部分をつまんだまま手を引き抜き、つま先部分を本品の中に残した状態で裏返す。
3. 裏返した本品につま先を入れ、かかとを合わせるように履く。
4. 十分に伸ばしながら少しずつたくし上げ、たるみやしわ、よじれがないことを確認する。
5. 全体的にしわが無く、かかどが正しい位置に収まっていることを確認し、長さを調節する。

〔装着後（装着中）の確認〕

1. つま先及びかかどが正しい位置に収まっていることを確認する。
2. たるみ、しわ、偏りが無いこと確認し、必要に応じて適時修正を行う。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

- 1) 術後など患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には、患者の状態をよく観察して使用すること。
- 2) ギプス、外傷などによる長時間の下肢不動状態の患者
〔潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため。〕

＜重要な基本的注意事項＞

- 1) 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズを選択すること。サイズ適応外の場合は使用しないこと。
- 2) 本品を折り返して使用しないこと。〔血行障害や神経障害を引き起こすおそれがあるため。〕
- 3) たるみやしわのないように装着すること。装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には装着し直すこと。〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕
- 4) 腫脹の軽減などにより装着中に各部位の周径が変わった場合は適切なサイズに変更すること。
- 5) 本品に破損（伝線、ほつれ、破れなど）がないことを確認してから装着すること。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないこと。
- 6) 本品は繊維製品のため、次のような場合は破損する場合があるので注意すること。
 - ・少しずつ引き上げず、強く引っ張りあげての装着
 - ・爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ・肌荒れした手や爪が伸びている手指での取り扱い
 - ・鋭利なものへの接触
- 7) 本品をはさみで切るなどの加工、修理を行わないこと。
- 8) 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始すること。

法を説明し、正しい装着手順で使用を開始すること。

- 9) 1日に数回、皮膚や爪の色に変化がないかを確認すること。また、1日1回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行うこと。
- 10) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等を付着させないこと。〔繊維が劣化するおそれがあるため。〕
- 11) 本品は個人用の製品であるため、他人への使い回しはしないこと。
- 12) 本品のほかに圧迫圧のあるストッキングを重ねて装着させる場合には、ストッキングに精通したものが判断し、患者への指導を行うこと。
- 13) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれなどの異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害などを発症するおそれがあるため。〕

＜不具合・有害事象＞

1. 重大な有害事象

1) 血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感など、血行障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、医師に相談すること。

2) 神経障害

腓骨神経麻痺などの神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

3) 皮膚障害

- ・本品のずれ、圧迫などにより、皮膚潰瘍などの皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・ショックなど、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意すること。

2. その他の有害事象

本品の装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、医師に相談すること。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もあるので、同様に医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、直射日光のあたるところを避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜クリーニング方法＞

- ・洗濯する場合、40度以上の温水、漂白剤、アイロン、乾燥機、ドライクリーニングは使用しないこと。〔繊維を劣化させるおそれがあるため。〕
- ・直射日光を避け、陰干しすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd

アイミン サニタリー マテリアルズ社

製造国名：台湾