

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 短期的使用口腔咽頭エアウェイ 70259000

再使用禁止

エアウェイ

【警告】**＜適応対象（患者）＞**

- ・反射が残っている患者への使用は注意すること。[嘔吐反射、咽頭痙攣を誘発するおそれがあるため。]

＜使用方法＞

- ・挿入後、開口部が閉塞されていないことを確認すること。
[不適切な挿入により、十分な気道の確保ができないおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】**＜適応対象（患者）＞**

- ・開口困難、巨大舌など本品の挿入が困難な患者へ使用しないこと。[適切な気道確保ができないおそれがあるため。]

＜使用方法＞

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】**1. 形状**

本品は、サイズの違いにより数種ある。未滅菌品である。

2. 外観（代表図）

ゲデルエアウェイ



バーマンエアウェイ

**3. 原理**

患者の口腔内に穏やかにカーブした中空またはH字構造の本品を挿入することで、舌による気流遮断を防止し、気道を確保する。

4. 材質

ゲデルエアウェイ：ポリエチレン、ポリアセタール

バーマンエアウェイ：ポリエチレン

【使用目的又は効果】

短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲した金属、プラスチック及びゴム製のチューブをいう。本品は、舌による気流遮断の防止に有用である。

【使用方法等】

1. 患者に合わせて適切なサイズ・形状を選択する。
2. カーブ先端を口蓋側にし、口腔内へ挿入する。
3. 半分ほど挿入したら、180 度反転させて先端を舌根部へ向けて挿入し正しい位置に設置する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・気道開通が不十分な場合は、頭部後屈や下顎挙上など用手的気道確保を併用すること。

【使用上の注意】**＜重要な基本的注意事項＞**

- ・使用前に滅菌が必要な場合は EOG 滅菌が可能である。EOG 滅菌を行う場合は、使用する機器の機能等を理解の上使用すること。[有毒ガス残存のおそれがあるため。]
- ・オートクレーブ、煮沸、薬剤（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム等）による滅菌・消毒は行わないこと。[本品の変形、破損および残液等が患者に悪影響をおよぼすおそれがあるため。]
- ・包装破損や本品に破損、ひび割れや変形等が見られた場合は使用しないこと。
- ・包装開封後はすぐに使用すること。
- ・必要に応じて本品に潤滑剤を塗布することができる。使用する際は使用する潤滑剤の取扱説明書等に従うこと。
- ・本品に潤滑剤の代わりに水を塗布しないこと。[水が患者の気管に入るおそれがあるため。]
- ・前歯を欠損や損傷している患者への使用は注意すること。[歯根膜繊維の断裂や前歯の脱臼のおそれがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

水濡れ、高温多湿、直射日光や紫外線を避け、清潔な暗所で保管すること。

2. 耐用期間

製造後 5 年[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Well Lead Medical Co.,Ltd.

ウェルリード メディカル社

製造国名：中国