

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 眼アプリケーション 10175000

PVA アイスパアー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

細いハンドル部の先端に三角形の吸水スポンジが取り付けられたものである。



2. 原材料

吸水スポンジ：PVA（ポリビニルアルコール）

3. 原理

吸水スポンジが薬液、排出物などを吸収、除去する。

【使用目的又は効果】

木材、軟性金属又は合成材料製の細いロッドの片端に綿撒糸または合成繊維等が取り付けられている機器で眼科用のものをいう。

【使用方法等】

＜使用方法＞

ハンドル部を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所当てる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

本品を強く当てすぎないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・術中、乾燥状態にある部位に使用しないこと。[組織を傷つけるおそれがあるため]
- ・使用前に包装に異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・本品を使用するために包装から取り出す際は、使用直前に開封し、以後の使用は無菌的操作により行うこと。
- ・使用前に包装に記載されている使用期限を確認し、使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・使用前に埃、異物などが付着していないことを確認すること。
- ・開封後はすぐに使用し、いったん開封した場合は未使用であっても廃棄すること。
- ・使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

3 年（表示ラベルに記載）

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Cenefom Corporation

セネフォーム社

製造国名 台湾