

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

再使用禁止

滅菌折りガーゼ

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ガーゼを折り畳んだもの。本品は滅菌品である。

2. 原理

綿が毛細管現象により液体を吸収する。

3. 材質

綿

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は污染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

本品を包装から無菌的に取り出し、開封後は直ぐに使用する。

【使用上の注意】

- ・使用時に開封し、速やかに使用すること。
- ・包装に開封、破損、水濡れ及び汚損等が見られる時は、滅菌品として使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

使用期限はパッケージに記載。

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（チョンヤン）社

製造国名：中国