

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

カット綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止。
- ・体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

白色の綿繊維からなる脱脂綿。

2. 原理

綿が毛細管現象により液体を吸収する。

3. 材質

綿

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌及びEOG滅菌が可能。

【使用上の注意】

- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Jiayu) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（ジャーユー）社

製造国名：中国