

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

再使用禁止

ナビス インジェクション絆創膏

【警告】

- ・感染の徴候（発赤、膿の浸出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）が認められる場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を受けること。


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・感染の徴候（発赤、膿の浸出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）がある場合に本品は使用しないこと。[使用した場合、傷の悪化、感染の悪化、治癒の遅延につながる恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

（代表図）

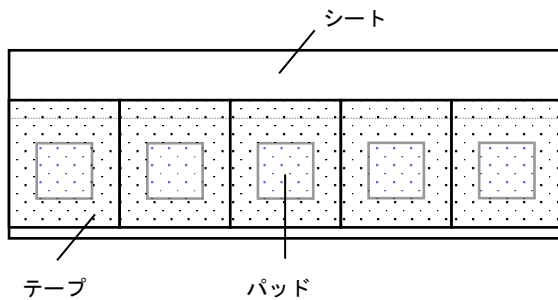

2. 原理

本品はアクリル系粘着剤が塗布されたポリエステル不織布製テープと、不織布パッドからなる止血用ドレッシング材である。創部に貼付することにより滲出液の吸収及び傷の被覆・保護等を行う。
本品は滅菌済みである。

3. 原材料

人体に接触する部分の組成：
テープ/アクリル系粘着剤
パッド/ポリエチレンフィルム、不織布

【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、粘着剤を付した絆創膏材をいう。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

準備：

- 1) 本品を使用する前に、貼付部位及びその周辺の皮膚を洗浄・消毒し、皮膚をよく乾かす。

【注意】 貼付部が乾燥していないと、はがれやすくなるので注意すること。

- 2) 本品の滅菌包装が破損していないことを確認し、開封後は直ちに使用する。

貼付：

- 1) 滅菌包装を開封し、滅菌済の本品を取り出す。
- 2) シートから、ベージュ色のテープを端部よりはがす。
- 3) 穿刺部等の傷にパッドをあて、粘着面を貼付し、そのまま粘着部を押さえてしっかり固定する。

剥がし方：

- 1) 本品の端を丁寧につかみ、皮膚が持ち上がらないように押さえ、折り返しながらかき剥がす。
- 2) 本品が創面に固着してしまった場合は、水を浸してゆっくと剥がす。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・粘着製品により皮膚障害を起こしやすい方は必ず事前に医師に相談すること。
- ・本品使用中に皮膚障害と思われる症状（発赤、発疹、痒み、水疱、腫れ、表皮の剥離など）が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けること。
- ・本品の使用中は貼付部位をよく観察し、感染の兆候（発赤、膿の浸出、発熱、腫れ、痛み、悪臭など）に十分注意すること。
- ・貼付部に粘着剤による発赤や浸出液等の貯留による浸軟（ふやけ）を起こす場合がある。また、表皮剥離を起こす場合もあるので、本品の使用時には十分な観察を行い、異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けること。

＜その他の注意＞

- ・本品は開封後、直ちに使用すること。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合には使用しないこと。
- ・本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

使用期限はパッケージに記載。

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Huanggang) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（フアンガン）社

製造国名：中国