

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

再使用禁止

ナビス 滅菌ドレープ


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたドレープである。使用部位や手術手技等に応じて寸法、形状、開窓部の有無等が異なるものを使用する。また粘着テープを有するものもある。本品は滅菌済みである。

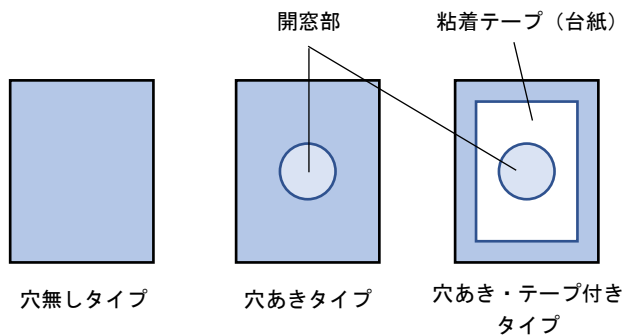

2. 原理

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離し、交差感染の防止、各種形態のエネルギーから保護をする。

3. 原材料

粘着剤：ホットメルト粘着剤（穴あき・テープ付きタイプのみ）

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 1) 滅菌包装から、本品を無菌的に取り出す。
- 2) 本品で患者身体の適切な部位を覆う。開窓部を有するものは、開窓部から外科切開部位や術野が露出するようにする。
- 3) 粘着テープを有するものは粘着テープの台紙をはがし、使用目的の部位・場所に掛けて使用する。
- 4) 手技が終了したら、本品を外し廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合やアレルギー性症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、医師に相談し適切な処置を行うこと。
- ・粘着テープをはがす際には、皮膚からゆっくりはがすこと。
- ・使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。損傷や水濡れがあれば使用しないこと。
- ・開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、廃棄すること。

＜その他の注意＞

- ・本品を再滅菌しないこと。
- ・高温を発する機器類に接しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

使用期限はパッケージに記載。

〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.

ウィナーメディカル（チョンヤン）社

製造国名：中国