

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

再使用禁止

ナビス バブルチューブ

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、接続用チューブである。チューブの切断箇所により接続端をファネル型あるいはテーパ型とすることができ、それぞれの適合チューブ径を選択できる。

本品は、未滅菌である。

＜代表的写真＞



内径 (mm)	外径 (mm)	全長 (m)
4.8～9.3	6.8～12.7	30
6.9～10.4	9.8～14.8	

2. 原材料

塩化ビニル樹脂（可塑剤：フタル酸ジイソノニル）

3. 原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】


本品は吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】


1. 使用方法

- 1) 接続機器の接続口の径を確認し、適切なチューブを選択する。
- 2) チューブには 90cm 間隔でバブル（ふくらみ）がついており、バブルの中央部で切断するとファネル状（図①）、バブルの隣接部で切断するとテーパ状（図②）の接続端が得られる。必要な箇所にてチューブをカットし、接続機器の接続口に接続する。

（図① ファネル状）

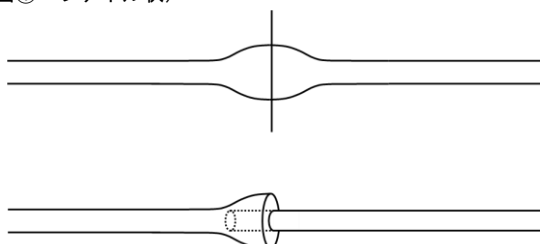

（図② テーパ状）

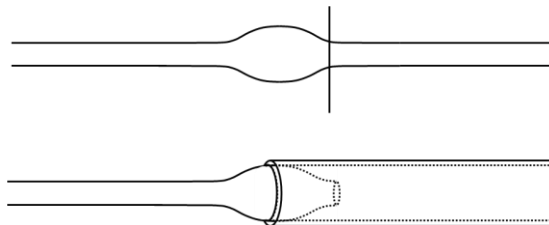

- 3) 緩みや外れが生じないようにしっかりと接続する。

2. 使用方法に関する使用上の注意

接続部への体液や薬液等の付着に注意すること。[接続部の緩み等のおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 製品に傷や劣化などを発見した場合は使用しないこと。
2. 未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外には使用しないこと。
3. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
4. チューブが折り曲げられたり、引張られた状態で使用しないこと。[接続部が外れるおそれがある。]
5. 体動でねじれると、流路が閉塞するおそれがあるので注意すること。
6. ある程度の練り込み（黒い点）は発生するが、性能上影響は無い。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

本品のラベルの有効期限欄を参照のこと。

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：平日 9：00～17：30（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Foremount Enterprise Co., Ltd.

フォームウントエンタープライズ社

製造国名 台湾