

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテル固定用パッチ 70328000

チューブ固定用パッチ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品は、カテーテル等を固定するための機器であり、固定部及び基材で構成される。
本品には以下の種類がある。

鼻管固定用パッチ

ドレーンチューブ固定用パッチ

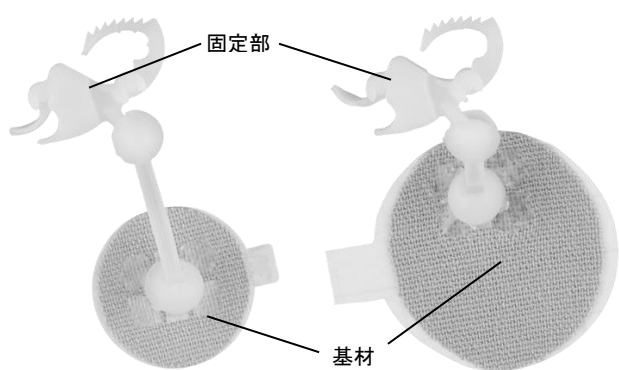

使用可能な鼻管径：5～18Fr

使用可能なチューブ径：5～40Fr

2. 原材料

基材：不織布、アクリル系粘着剤

3. 原理

本品は、基材裏面に付けた粘着剤により患者皮膚に貼り付け、固定部によりカテーテル等を任意の位置で固定する。

【使用目的又は効果】

カテーテル等を簡便に固定するために、片面に粘着剤を塗布し、他方にカテーテル固定具をもつ器具をいう。


【使用方法等】

<装着の前に>

- ・ 本品の装着部位を確認し、当該部位の皮膚をぬるま湯又は石鹸水で洗い、よくすすぐ。
- ・ 本品を皮膚上に固定させるために、皮膚は清潔で乾燥した状態にする。また、ローションやクリーム等を使用すると、基材の接着を妨げるので使用しないこと。

<装着方法>


- 1) 基材裏面の剥離紙を剥がす。
- 2) ギアリングとクリップ部の間にカテーテル等が位置するように調整し、ギアリングをクリップ部に押し込んでカテーテル等を固定する（図①）。その後、清潔にした皮膚に基材を貼り付け、周囲を軽く指で押して剥がれないように密着させる。

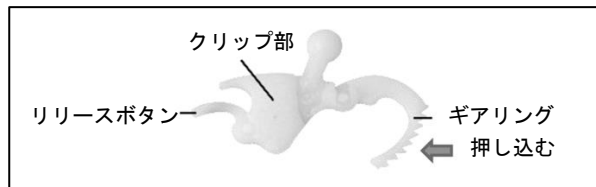

図①

<取り外し・交換方法>

- 3) クリップ部を保持しながらリリースボタンを押し込み、ギアリングを引き抜いてカテーテル等を取り外す（図②）。

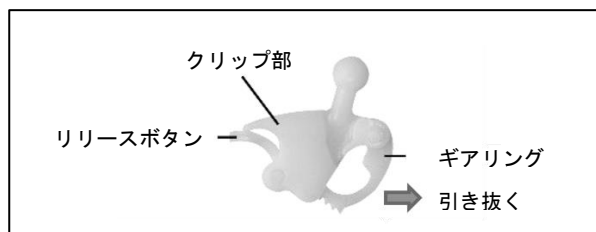

図②

- 4) 基材の端を少し持ち上げ、皮膚を過度に引っ張らないように慎重に剥がす。
- 5) 新しい本品を用意し、<装着方法>の 1) ～3) を繰り返して本品にカテーテル等を固定する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本品の使用において、カテーテル等の適切な使用方法については、カテーテル等の取扱説明書を参照すること。また、カテーテル等の挿入、モニタリング及び取り外しについては現行の標準的な臨床手順に従うこと。
- ・ 固定部のギアリングをきつく閉めすぎないこと。[圧力によってカテーテル等の閉塞や損傷が生じるおそれがある]
- ・ 本品使用中に皮膚障害と思われる症状（発赤、発疹、痒み、水疱、腫れ、表皮の剥離等）が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けること。
- ・ 貼付部に粘着剤による発赤等を起こす場合がある。また、表皮剥離を起こす場合もあるので、本品の使用時には充分な観察を行い、異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を受けること。
- ・ 鼻管固定用パッチをご使用の場合、カテーテル等が鼻腔内に触れないように固定すること。
- ・ 本品に破損、ひび割れや変形等が見られた場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、高温多湿、火気や直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 有効期間
パッケージに記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL : 0120-711-875

受付時間 : 平日 9 : 00~17 : 30 (土日祝・弊社休業日は除く)

製造業者 Alger Technology Co., Ltd.

アルガーテクノロジー社

製造国名 台湾