

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 婦人科用剥離子 70955000

ナビス サービカルブラシ ツイン

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・妊娠されている方には使用しないこと。[妊娠の継続に支障をきたすおそれがある。]
- ・子宮内避妊器具等の装着者には使用しないこと。[ブラシの先端が器具に引っ掛かり、外れる可能性がある。]

【併用禁忌】

- ・細胞を採取する際に、腔部への潤滑クリーム等の使用は避けること。[細胞の採取に影響が出るおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造（代表図）

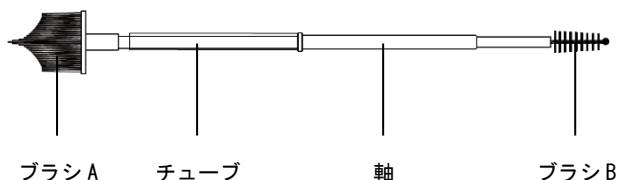

2. 原材料

ブラシ A：PE（ポリエチレン）

ブラシ B：ナイロン、ステンレス鋼

軸・チューブ：PP（ポリプロピレン）

3. 原理

器具先端のブラシで処置部を擦ることにより、細胞を採取する。

【使用目的又は効果】

本品は、細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するためのブラシである。軸に付属するチューブをブラシ側に押し出すことで、ブラシ A を軸から取り外すことができる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。
2. (ブラシ A)
子宮頸管部にブラシの先端を挿入し、ブラシ全体を子宮頸部に軽く押し当てながら時計回りに 2～5 回転させる。
(ブラシ B)
子宮頸管部にブラシを挿入し、時計回りにゆっくり 2、3 回転させる。子宮頸管部への挿入はブラシのみとし、軸部まで入らないようにする。
3. 本品を静かに抜き取る。
4. 以下のいずれかの方法により、細胞診用の標本を作製する。
(※標本作成の詳細は、各標本作成方法の説明書に従うこと。)

A. 液状化細胞診法（ブラシ A）

- 1) ブラシを固定液の入ったバイアルに入れる。
- 2) チューブをブラシ側に押し当てブラシを取り外し、軸をバイアルから引き抜く。
- 3) ブラシが固定液に浸かっていることを確認し、バイアルの蓋をしっかりと閉じる。

B. 直接塗抹法（ブラシ A、ブラシ B）

- 1) スライドガラスにブラシ部分を回し当てながら、細胞を塗抹する。
- 2) 塗抹した細胞が乾燥しないように、固定液で固定する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・使用前に製品に傷や汚れ、バリ等がないか確認すること。傷や汚れ、バリ等が確認された場合は使用しないこと。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合は使用しないこと。
- ・個包装の開封後は速やかに検体採取を行い、採取後は速やかに標本作製に供すること。
- ・本品を器具で曲げる等、変形させて使用しないこと。
- ・強い抵抗がある状態でブラシを回転させる等、検体を採取する際に過度な力をかけないように注意すること。[子宮頸管内・子宮腔頸部の損傷による出血や、ブラシの意図しない抜去が発生するおそれがあるため。]
- ・検体を採取する際、無理に子宮頸管の奥に挿入しないこと。[子宮頸管内の損傷による出血や、ブラシの意図しない抜去が発生するおそれがあるため。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品を自己採取には使用しないこと。
- ・製品への強い負荷や他器具との接触等により、ブラシ部が破損脱落し、体内に残存する恐れがあるため注意すること。
- ・検体の採取中にブラシが抜去・脱落した際は使用を中止し、速やかにピンセット等で回収すること。
- ・子宮筋腫などで子宮が変形している可能性がある場合は、特に挿入に注意すること。
- ・子宮頸管狭窄等の場合は必要に応じ、拡張処理を行い慎重に挿入すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
5 年[自己認証（当社データ）による]
(使用の期限は個包装及び化粧箱に記載)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL : 0120-711-875

受付時間 : 午前 9 : 00~12 : 00、午後 1 : 00~5 : 30

(土日祝・弊社休業日は除く)

製造業者

Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.

ジャンス ハンヘン メディカル テクノロジー社

製造国名 中華人民共和国