

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 硬性直達肛門鏡 10156001

ディスポーザブル肛門鏡

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造（代表図）

本品は、肛門鏡本体と内筒から構成される。

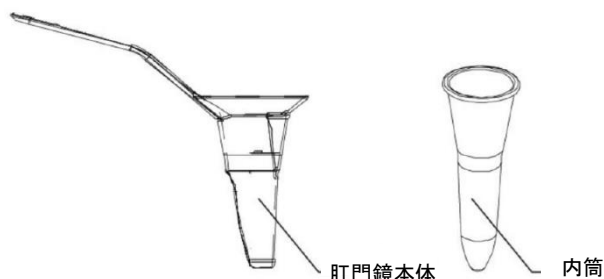

2. 原材料：PC（ポリカーボネート）

3. 原理

肛門から挿入して肛門管および下部直腸内を拡張することにより、観察、診断、治療を行う。

【使用目的又は効果】

肛門管及び下部直腸の観察、診断、治療に用いる直達鏡をいう。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。
2. 肛門鏡本体に内筒を取り付けた状態で、所定の位置まで肛門に挿入する。
3. 内筒を抜去し、観察、診断、治療を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・使用前に製品に傷や汚れ、バリ等がないか確認すること。傷や汚れ、バリ等が確認された場合は使用しないこと。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合は使用しないこと。
- ・包装開封後は速やかに使用すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本肛門鏡にはスリットがあるため、肛門挿入後の回転は極力控え、回転させる時は組織を挟み込まぬよう注意をすること。
- ・肛門鏡本体が体内にある状態で、内筒を再度取り付けないこと。
[組織を挟みこんだり傷つけたりするおそれがあるため。]
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと。
- ・破損、曲がり等の原因になる可能性があるので、使用時には必要以上の力を加えないこと。
- ・本品を器具で曲げる等、変形させて使用しないこと。
- ・使用に際して潤滑材が必要な場合は、水溶性潤滑材を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
3 年[自己認証（当社データ）による]
（使用の期限は個包装及び化粧箱に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：午前 9：00～12：00、午後 1：00～5：30

（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Well Care (Wuhan) Medical Technology Co., Ltd.

ウェルケア（ウーハン）メディカルテクノロジー社

製造国名 中華人民共和国