

機械器具 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

再使用禁止

ディスプレイザブル喉頭鏡ブレード

【禁忌・禁止】

- ISO7376 に適合しないハンドルと組み合わせて使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

ISO7376 に適合する喉頭鏡ハンドルとの接続部を持つ喉頭鏡ブレードである。本品は、単回使用である。

(代表図)



2. 原材料

PC、PMMA

3. 原理

ISO7376 に適合したハンドル（別売）に装着することで光源が点灯する。先端が発光したブレードを喉頭内に挿入し、気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具をいう。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

【使用方法等】

- ISO7376 に適合したハンドル（別売）にブレードを取り付け、ブレード先端が発光することを確認する。
- 使用後はハンドルからブレードを取り外す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品による挿管が困難であると判断された場合は、本品による挿管作業を中止すること。[歯牙、口唇、喉頭蓋、声帯などを傷つけるおそれがあるため]
- 吸引で取り除くことが出来ない液体や固形物が気道にある患者に使用しないこと。
- 開口障害、開口制限、咽頭・喉頭周囲腫瘍または外傷がある患者には使用しないこと。
- 適切な気管挿管の方法を適用すること。
- 使用前に製品に傷や汚れ、バリ等がないか確認すること。傷や汚れ、バリ等が確認された場合は使用しないこと。
- 包装が破損または汚損等している場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

製造後 5 年（個包装に記載）

[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL:0120-711-875

受付時間：午前 9：00～12：00、午後 1：00～5：30

（土日祝日及び弊社休業日は除く）

製造業者

Foremount Enterprise Co., Ltd.

フォーマウントエンタープライズ社

製造国名 台湾