

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用気管内チューブスタイレット 37469000

再使用禁止

ディスポスタイレット

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・本品を切断して使用しないこと。[気管内チューブを破損させ、気管等を損傷させるおそれがある]
- ・本品に必要以上の力を加えないこと。[本品が折損し、気管内チューブを破損させるおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造（代表図）



2. 材質

アルミニウム、PVC（可塑剤：アセチルクエン酸トリブチル）

3. 原理

本品を気管内チューブに挿入することにより、柔らかい気管内チューブの形状を安定させ、気管への挿入を容易にする。

【使用目的又は効果】

気管内チューブを安定させ、声帯の通過を容易にするために用いる器具をいう。挿管前に気管内チューブに挿入し、挿管完了後に抜去する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 本品を滅菌包装から取り出す。
2. 本品に水溶性潤滑材を塗布し、気管内チューブに挿入する。
3. 気管内チューブごと本品を必要な角度に曲げて形を整える。この時、気管内チューブから本品が抜去できることを確認する。
4. 本品を挿入した気管内チューブを患者に挿管し、本品を気管内チューブから抜去する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・使用前に、本品に破損等がないか確認すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合は使用しないこと。
- ・包装開封後は速やかに使用すること。
- ・本品が気管内チューブの先端から突出した状態で使用しないこと。また、気管内チューブにマーフィー孔がある場合、本品がマーフィー孔から出ないように注意すること。[スタイレットの先端で気管内を損傷するおそれがあるため]
- ・本品の挿入時及び抜去時は、気管内チューブのコネクタの縁でスタイレットを擦らないこと。[スタイレット表面のチューブが破損し、気管内に脱落するおそれがあるため]
- ・気管内チューブから本品の抜去が困難である場合は、気管内チューブと一緒に抜去すること。[無理に引き抜いた場合、患者の気管及び気管内チューブが損傷するおそれがあるため]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品を経鼻挿管には使用しないこと。
- ・本品を過度に変形させないこと。[金属疲労により破損し、正常に使用できなくなるおそれがあるため]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、高温又は湿度の高い場所、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

2. 有効期間

製造日より5年[自己認証（当社データ）による]
（使用の期限は個包装に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：午前9：00～12：00、午後1：00～5：30

（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Well Lead Medical Co., Ltd.

ウェルリードメディカル社

製造国名 中華人民共和国