

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

ナビス 滅菌スワブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造（代表図）

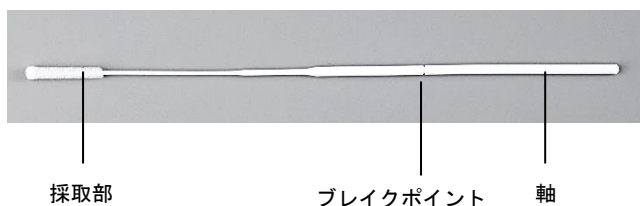

軸にブレイクポイントがあり、検体採取後に綿棒を折ることができる。

2. 原材料

採取部：ナイロン

軸：PP（ポリプロピレン）

3. 原理

先端の採取部を検体を採取する場所にあて、検体を採取する。

【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

1. 個包装の開口部より開封し、本品の軸部分をつまんで個包装から取り出す。
2. 検体を採取する場所に採取部をあて、検体を採取する。
3. 検体採取後にブレイクポイントを折ることで、容器内で保管することができる。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品の使用は1回限りであり、再使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・開封後は速やかに検体採取を行い、使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。
- ・検体の取り扱いは感染の危険性があるものとして、保護具（保護服、マスク、ゴーグル、手袋等）を着用の上、十分に注意して操作を行うこと。
- ・検体を採取するときに、採取する粘膜等の部位を傷付けないよう無理な力をかけないこと。
- ・検体採取時に軸部分に力をかけすぎたり、強く押す等の負荷をかけたりして軸部を折らないように注意すること。
- ・検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させたりして使用しないこと。
- ・使用中に本品が破損した場合は速やかに使用を中止し、新しいものを使用すること。
- ・本品を凍結や加熱しないこと。
- ・使用前に製品に傷や汚れ、バリ等がないか確認すること。傷や汚れ、バリ等が確認された場合は使用しないこと。
- ・使用前に包装が破損または汚損等している場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
5年[自己認証（当社データ）による]
（使用の期限は個包装及び化粧箱に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社

TEL：0120-711-875

受付時間：午前9：00～12：00、午後1：00～5：30

（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者

Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd.

ジャンス ハンヘン メディカル テクノロジー社

製造国名 中華人民共和国