

ナビスプローブカバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者の使用及び患者への使用は禁止。（使用上の注意の項参照）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は天然ゴムラテックス製の人体開口部用超音波プローブカバーである。
本品に潤滑剤が塗布されたもの（ウェットタイプ）もある。本品は未滅菌である。

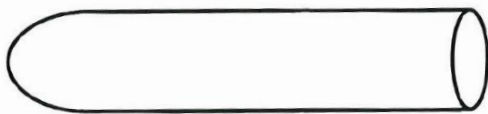

* 寸法：全長/195±10mm、折幅/52±2mm、厚さ/0.075±0.025mm

2. 原材料

本体：天然ゴムラテックス
表面処理剤：コーンスターチ
潤滑剤：シリコンオイル（ウェットタイプのみ）

3. 原理

本品は、超音波診断装置の探触子（プローブ）に被せることにより、体腔内（腔内）に挿入した際のプローブの汚染を防ぎ、医療従事者及び患者間の交差感染を防ぐ。

4. 仕様

項目	仕様
ピンホール	水漏れがないこと
強度	切断時引張力(N)：8.75 以上 切断時伸び(%)：700 以上

【使用目的又は効果】

超音波プローブに装着し、体液等から保護するために用いること（単回使用のものに限る。）。

【使用方法等】

- (1) 本品を個包装内の端によせ、本品から遠い端を指で破り、本品を傷つけないよう取り出します。
- (2) プローブの先端（超音波発信部）に超音波用ゼリーを適量滴下します。
- (3) 巻方向に注意して、本品をプローブの上に置きます。（逆向きに置くと巻きほぐせなくなります。）
- (4) 本品をプローブの根元に向かって巻きほぐし、プローブ全体に被せます。
- (5) 被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定したまま操作します。その際に、本品を引っ張り気味に握り、プローブ先端と本品との間の空気を除去してください。（空気が入っていると画像に影響がでます。）
- (6) 検査終了後、本品は汚染されていますので、感染等に十分留意しながら裏返すようにゆっくりと本品を取り外してください。
- (7) 本品はディスポーザブル製品のため、再使用できません。使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- ・天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
- ・本品は経腔プローブ用のカバーです。その他のプローブでの使用はやめてください。また、装着時に張力のかからないサイズのプローブを使用してください。
- ・包装を開封したらすぐに使用してください。
- ・包装が破損していたり、汚損していた場合は、使用しないでください。
- ・製品が若干巻きほぐしにくいことがありますので、爪やプローブなどで製品にキズをつけぬようにていねいに巻きほぐしてください。[破れの原因となる]
- ・超音波用ゼリーは水溶性のものをお使いになり、石油系・鉱物油系のものは使用しないでください。プローブカバーを傷つける原因となります。
- ・刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
- ・プローブ抜去後はプローブカバーを確認してください。破れている場合はプローブが汚染されている恐れがありますので、感染等に留意し適切な措置を施してください。

＜相互作用＞

- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上ご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光、オゾン、高温や多湿を避けて保管してください。また、揮発性の成分と一緒に保管しないでください。
- ・購入時の包装に入れたまま保管し、その都度取り出してください。

2. 有効期間

製造後 5 年（箱及び個包装の記載を参照のこと）
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

アズワン株式会社
TEL：0120-711-875

* 受付時間：午前 9：00～12：00、午後 1：00～5：30
（土日祝・弊社休業日は除く）

製造業者 Karex Industries Sdn. Bhd.

カレックスインダストリーズ社

製造国名 マレーシア