

1 / 2

【使用上の注意】

使用上の注意の詳細は、取扱説明書の「安全上の注意」を参照してください。

1 次のような場所では使用しないこと。

- ・反射物、振動がある環境
- ・視覚・聴覚外乱のある環境
- ・水のかかるおそれのある場所
- ・温度、湿度、直射日光、ほこり、塩分、硫黄分等を含んだ空気等により悪影響を受ける場所、屋外
- ・傾斜、振動、衝撃のある不安定な場所
- ・化学薬品の影響やガス発生のおそれがある場所
- ・火気のそば
- ・電磁干渉のある場所

2 重要な基本的注意

[使用前]

- ・電源の周波数、電圧及び電流量(又は消費電力)に注意して設置すること。
- ・電源の接続を、「たこ足配線」にしないこと。
- ・機器を設置するときには、各コネクタを確実に接続して最後に電源を入れること。
- ・機器が正常で安定に作動することを確認すること。
- ・アース線が完全に接続されていることを確認すること。
- ・すべてのコード類が正確で完全に接続されているかどうかを確認すること。
- ・電源投入後は約5分程度ウォーミングアップすること。
- ・配線は踏みつけたり、つますいたりしないよう適切に配置すること。
- ・PoE+、PC、モニタは患者環境外に設置すること。
- ・PoE+、PC、モニタの電源は、絶縁トランスを経由して接続すること。

[使用中]

- ・使用中は患者、または本品に異常がないか常に確認すること。
- ・違和感、痛みなど患者が異常を訴える場合は、安全な状態でただちに機器を停止し、適切な処置を行うこと。
- ・本品に異常を感じたときは電源を切り、故障を疑う場合は「使用不可」等の表示を行い、修理が終了するまで使用しないこと。
- ・カメラ用ケーブルやカメラ周囲に注意し、カメラを転倒、落下させないように注意すること。
- ・マーカーは乱暴な扱いはしないこと。

[使用後]

- ・定められた手順により、操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻して、電源スイッチを必ず切ること。
- ・機器は次の使用に支障のないように、必ず清浄にしておくこと。

3 その他の注意

- ・液体の溶剤、洗浄剤等でマーカーを洗わないこと。
- ・故障のときは電源を切り、修理が終了するまで使用しないこと。
- ・付属品や消耗品は供給品以外使用しないこと。
- ・本品を落とすなど、衝撃を与えないよう注意すること。
- ・本品の上に液体の入った容器や物を載せないこと。
- ・本品を分解、改造しないこと。
- ・本体の隙間から内部に物が入らないように注意すること。
- ・本体の通気口を塞がないこと。
- ・本体や付属品の下に紙を置かないこと。

4 不具合・有害事象

1) 不具合

動作不良、故障、モニタ不良、破損、誤計測

2) 有害事象

アレルギー反応、皮膚炎、痒み、かぶれ、悪心、不快感、過呼吸、転倒による怪我

*[サイバーセキュリティに関する注意]

- 1 施設のネットワークまたは他の機器、本品操作以外のPCを接続して使用する場合は、製造販売業者と合意して進めること。
- 2 USBメモリその他媒体に診療データを書込む場合は、ウィルスチェック等を行いセキュリティ確保に努めること。
- 3 本医療機器の使用と関連のないソフトウェアのダウンロード・インストールを行わないこと。
- 4 製造販売業者の合意を得ることなく、OSの更新、アカウント権限やファイアウォールの設定変更を行わないこと。
- 5 本品のPCを診療目的以外に使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

- 1 本体、付属品は清浄にして保管すること。
- 2 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 3 耐用期間: 5年間 [自己認証(当社データ)による]
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合。
反射マーカー及び両面テープなどの消耗品を除く。

【保守・点検に係る事項】

- 1 常に本体及び付属品の状態を確かめ、亀裂、破損、動作不良等がある場合は製造販売業者または取扱店に依頼して修理・交換をすること。
- 2 本体を清掃する際はアルコールや有機溶剤を使用せず、軽く布拭きすること。
- 3 一定期間(満1年)使用した機器本体は、定期点検を製造販売業者または取扱店に依頼する。

[使用者による保守点検事項]

点検項目	点検時期	点検内容
外観確認	使用前	本体及び付属品の破損、劣化の有無

※詳細については取扱説明書の保守点検の項を参照すること。

[業者による保守点検事項]

点検項目	点検時期	点検内容
・電気回路部点検	12ヶ月	システム接続確認、アナログ入力確認

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： インターリハ株式会社
住 所： 東京都北区上中里 1-37-15
製 造 業 者： Vicon Motion Systems Limited
国 名： 英国

*[サイバーセキュリティに関する問合せ先]

インターリハ株式会社
住 所： 東京都北区上中里 1-37-15
T E L： 03-5974-0231
F A X： 03-5974-0233