

機械器具 76 医療用吸入器

一般医療機器 耳鼻咽喉科用ネブライザ JMDN 70451000

鼻用ワニ型ネブライザー

【警告】

- ① 本製品は、取扱に注意し、不用意に衝撃を与えないで下さい。
- ② 本製品は、未滅菌です。
- ③ 製品のご使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な用途での使用を行わないで下さい。製品自体の劣化・破損をおこす原因となります。

【禁忌・禁止】

- ① 本製品の加工、改造等は絶対行わないで下さい。製品に衝撃をくわえたり、振動・切削・打刻等の二次加工は製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となります。
- ② 製品に割れ・欠け・ひび等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。ケガの原因になります。
- ③ 使用圧力は、1 kg/cm<sup>2</sup>以上かけないでください。破損する恐れがあります。
- ④ 超音波洗浄機は使用しないで下さい。破損する恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

材質：ガラス

【使用目的、効能又は効果】

本品は患者に吸入させるため、エアゾル化した水又は医薬品を供給する器具である。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 噴霧口を上向きに立てにしてご使用ください。
- (2) 圧縮空気供給チューブ接続部に圧縮空気供給チューブを接続する。
- (3) 側部薬液入口より薬液を入れ、栓をする。

- (4) 圧縮空気供給チューブより約 0.5～0.8 kg/cm<sup>2</sup>の圧縮空気を供給し使用する。

【使用上の注意】

- (1) 医師又は看護師等の指導のもとでご使用ください。
- (2) 本製品は、未滅菌品です。必ず洗浄、滅菌してご使用ください。
- (3) 使用圧力は、約 0.5～0.8 kg/cm<sup>2</sup>に調整してご使用ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

本製品は、医療用具です。保管・管理に関しては、特に故障・破損を招く行為の禁止および注意を促し、十分な注意と責任を持って管理してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本製品を包装から取り出す場合は、先端部や細い部分には十分注意して、ケガなど無いように包装から取り出し滅菌してください。
- (2) 滅菌に際しては、他のガラス器具同様、粗雑な扱いは避け、先端部や細い部分に無理な力を加えたり、衝撃・干渉により双方に損耗が無いよう注意してください。滅菌中に破損したり、それによって思わぬケガをする場合が考えられます。

使用上の注意だけでなく、滅菌においても十分注意してください。

- (3) 滅菌は、蒸気滅菌等による滅菌を行ってください。
- (4) 本製品は、本状以外に特に別添・別紙添付文書等の情報提供文書が同梱されている場合にはその指示に従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元：石山理化学硝子製作所 石山義彦

住所：〒124-0011 東京都葛飾区四つ木 3-9-9

TEL 03-3693-5854