

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード: 34655000

カルノン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止 [ディスプレイ製品のため]
2. 再滅菌禁止 [再滅菌を意図していないため]
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと [品質を担保できないため]
4. 記載の使用目的以外に使用しないこと
5. アルギン酸パッド等、本品の成分に対してアレルギーのある患者には使用しないこと

【形状、構造及び原理等】

- ・ 本品はアルギン酸カルシウムの繊維のみを不織布状にしたものである。
- ・ 白色からベージュ色のシート状である。
- ・ 滅菌済み製品であり、単回使用製品である。



サイズ

10cm×10cm (型番 : CAL-1010)

カスタムサイズ

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

創傷面を清浄し、本品を押し当てて用いる。必要に応じて、テープ等で固定する。

【使用上の注意】

<基本的注意>

1. 使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。
2. 傷に化膿、熱、腫れ等のある場合は使用しないこと。

<その他の注意>

1. 使用後は感染性廃棄物として処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 高温、低温、多湿、及び直射日光を避け、常温で清潔な場所にて保管すること。
2. 損傷の原因となり得る保管方法は避けること。

<有効期間>

ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社京都医療設計
: 京都府京都市山科区四ノ宮神田町 4
古橋山科ビル

電話番号 : 075-594-5598

FAX 番号 : 075-594-6444

外国製造業者 : Roosin Medical Co., Ltd.

製造国 : 中国