

機械器具6 呼吸補助器  
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ コード 70569000

## Hライン 酸素チューブ (ニップルナット)

再使用禁止


HSF0101

### 【禁忌・禁止】

- 使用方法  
・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

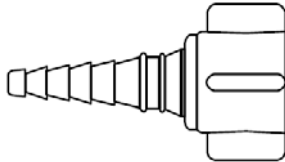

#### 2. 材料

本品はポリアセタール製である。

#### 3. 原理

機器から供給された酸素を患者へ送気するための通路として機能する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、呼吸回路またはマスクに酸素を供給するために用いられるチューブである。

### 【使用方法等】

以下の操作手順は、一例として示したものである。

1. 本品を介して、酸素供給ラインと酸素チューブを接続する。
2. 患者側端にガスが流れていることを確認する。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- \*・接続する機器(酸素供給ライン及び酸素チューブ)と確実に接続し、ガスが漏れていないことを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

#### ■外国製造所

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

—製造販売元—

 株式会社 インターメド ジャパン