

Hライン 麻酔回路

再使用禁止

HSF0144

【警告】

使用方法

- ・使用前に麻酔器メーカーの取扱説明書に基づいて、回路のテスト及びガスサンプリングチューブのテストを行うこと。[患者への傷害を防ぐため。]

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止。
- ・本品は洗浄又は滅菌をしないこと。[有害物質の残留のおそれや、接続部の変形・破損により漏れを起こすおそれがあるため。]
- ・本品は、可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと。[本品は非導電性であり、爆発のおそれがあるため。]

併用医療機器「相互作用の項参照」

- ・本品と人工鼻又は人工鼻フィルタを接続する場合は、ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと。[人工鼻及び人工鼻フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]
- ・患者と回路のYコネクタとの間にフィルタを接続する場合は、ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと。[フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]


【形状・構造及び原理等】

本添付文書は、Y回路タイプの麻酔回路について記載している。


1. 形状

(1) 回路


①Y回路タイプ(標準)

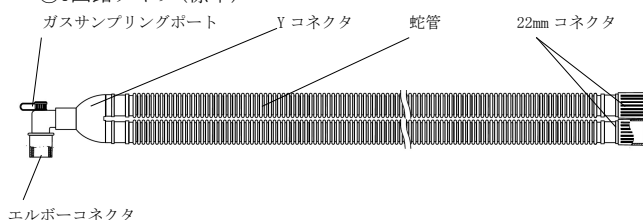

②Y回路タイプ(伸縮蛇管)

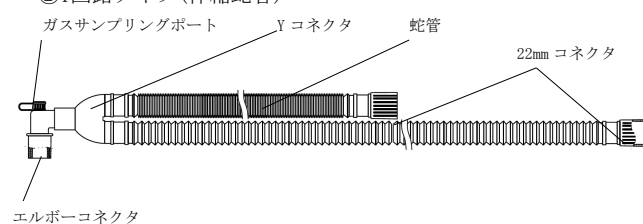

(2) 麻酔バッグ

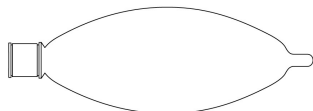

2. 仕様

蛇管の長さ：1.5m又は2m

3. 原理

主に軸方向に蛇腹形状となっている蛇管と接続部品であるコネクタで構成された人工呼吸回路であり、これを麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いる。

【使用目的又は効果】

本品は、麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いる器具類である。

【使用方法等】

1. 22mmコネクタを麻酔器の呼気側接続口及び吸気側接続口にそれぞれ接続する。
- ** 2. 麻酔バッグを使用する場合は麻酔器のバッグ接続部に接続する。
- ** 3. エルボーコネクタをマスク等に接続する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ** フィルタを使用する場合は、目的に応じて呼気側もしくは吸気側の22mmコネクタ又は患者側コネクタに接続して使用すること。
- ・呼気側22mmコネクタにフィルタを取り付けた回路において、ネブライザ療法を行う場合、粘稠な薬剤は十分に注意して投与すること。[フィルタが目詰まりをお越し、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]
- ・エアクッションマスクを使用する際は、クッション内に適切な量のエアが入っている事を確認すること。患者の顔にフィットするよう、必要に応じて、バルブにシリンジを接続し、クッション内のエア量を調節すること。
- ・全ての接続部に緩みや外れが生じていないことを確認すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・本品は一人の患者のみに使用すること。

**<相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関する事)>

1. 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工鼻又は人工鼻フィルタとネブライザ又は加温加湿器	併用禁止	人工鼻、人工鼻フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。
フィルタとネブライザ又は加温加湿器	併用禁止(患者と回路のYコネクタとの間にフィルタを接続する場合)	フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難を起こすことがあるため。

【保管方法及び有効期間等】

**<保管の条件>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造業者

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾