

管理医療機器 機械器具6 呼吸補助器  
麻酔回路セット コード 70567000  
**Hライン 麻酔回路(バクテリアフィルタ)**

再使用禁止

HSF0161

**【禁忌・禁止】**

使用方法

- ・再使用禁止
- ・本品は24時間を超えて使用しないこと。
- ・分泌物過多の患者や喀痰が血性である患者への使用禁止。[流量抵抗が上昇したり、回路が閉鎖したりするおそれがある。又、人工呼吸器との併用においては、呼吸回路に外れが生じた場合でも、低圧警報が作動しないおそれがある。]
- ・本品は可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと。[本品は非導電性であり、爆発のおそれがあるため。]

併用医療機器

- ・患者と回路のYコネクタとの間に本品を接続する場合は、ネプライザを併用しないこと。[フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]

**【保管方法及び有効期間等】**

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン  
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951


■外国製造業者

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

**【形状・構造及び原理等】**

本添付文書は、フィルタについて記載している。

1. 形状

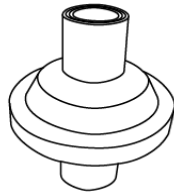

2. 仕様

- ・バクテリアろ過効率(BFE)：99.999%を超えていること。
- ・ウイルスろ過効率(VFE)：99.99%を超えていること。

3. 原理

吸気ガス又は呼気ガスが、本品に内蔵される不織布製フィルタを通過することにより除菌される。

**【使用目的又は効果】**

本品は、麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いる器具類である。

**【使用方法等】**

本品は、回路の呼気側もしくは吸気側の22mmコネクタ又は患者側コネクタに接続して使用する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・回路との接続部に緩みや外れが生じていないことを確認すること。
- ・患者を注意深くモニターすること。異変が見られる場合は、本品を取り外すか、新品に取り替えること。
- ・他の器具と接続して使用する場合は、十分に吸気・排気を確保する回路となっていることを確認して使用すること。[回路が閉塞するおそれがある。]
- ・使用時間が24時間に達する前でも、分泌物が溜まったときなど必要に応じて新品に交換すること。

**【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

- ・本品を呼気側22mmコネクタに取り付けた回路において、ネプライザ療法を行う場合、粘稠な薬剤は十分に注意して投与すること。[フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがあるため。]

—製造販売元—

 株式会社 インターメド ジャパン