

## Hライン 麻酔回路(麻酔バッグ)

再使用禁止

HSF0171

### 【禁忌・禁止】


使用方法

- ・再使用禁止。
- ・本品は洗浄又は滅菌をしないこと。[有害物質の残留のおそれや、接続部の変形・破損により漏れを起こすおそれがあるため。]
- ・本品は可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと。[本品は非導電性であり、爆発のおそれがあるため。]

### 【形状・構造及び原理等】

本添付文書は、麻酔バッグについて記載している。

#### 1. 形状

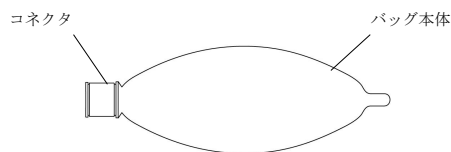

#### 2. 仕様

品番	バッグ容量(実容量)
370506	1L
370507	2L
370508	3L

#### 3. 原理

麻酔器の呼吸回路に接続し、柔軟なバッグ内に患者の呼吸ガスを保存する。

### 【使用目的又は効果】

本品は、麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いる器具類である。

### 【使用方法等】

本品は麻酔器のバッグ接続部に取り付けて使用する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・麻酔器との接続部に緩みや外れが生じていないことを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

<有効期間>

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン  
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

#### ■外国製造業者

シーナ社 (Hsiner Co., Ltd.) 台湾

—製造販売元—