

機械器具50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

ディスポLED喉頭鏡ブライトプロ

再使用禁止

FMF0040

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


本品はハンドル及びブレードのセット、あるいはハンドル、ブレード単体で構成される。

ハンドル：スタンダードタイプ

ブレード：マッキントッシュタイプ又はミラータイプ

各タイプのサイズバリエーションは下表のとおり。

(1) 各部の名称

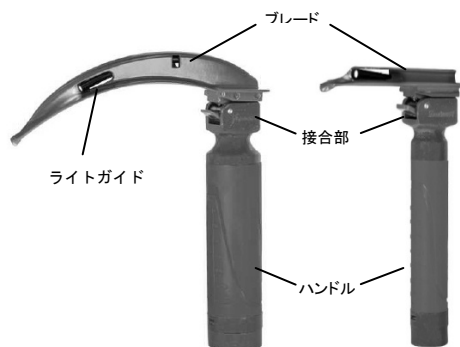

(2) ブレードの寸法

1) マッキントッシュタイプ

呼称サイズ	ブレードの長さ
マッキントッシュブレード1	96mm
マッキントッシュブレード2	111mm
マッキントッシュブレード3	134mm
マッキントッシュブレード4	150mm

2) ミラータイプ

呼称サイズ	ブレードの長さ
ミラーブレード00	65mm
ミラーブレード0	80mm
ミラーブレード1	106mm
ミラーブレード2	154mm

2. 原材料

- ・ブレード：亜鉛（ポリ塩化ビニル被膜）

3. 原理

ハンドルにブレードを固定すると、ハンドルに内蔵されたLED光源が点灯し、発生した光がブレードに装着されたライトガイドにより伝送され、先端から出射される。


【使用目的又は効果】

本品は、麻酔又は救急医療等において、気道確保のための気管内チューブの挿入、配置の支援、異物の除去、あるいは、喉頭及びその周辺の観察、診断、治療に使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 滅菌包装を開封し、本品を取り出す。
- (2) ブレードとハンドルが分離している場合は、両者の接合部をかみ合わせる（下図A及びB）。
- (3) ブレードを水平に起こして確実にロックし、ライトガイド先端から光が出射されることを確認する（下図C及びD）。
- (4) 通常の喉頭鏡手技により、観察、診断、挿管等の処置を行う。

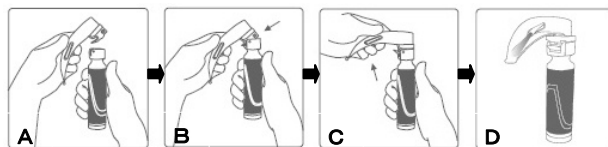

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- ・ライトガイドから出射される光を直接目に当てないこと。[目を傷めるおそれがある。]
- ・本品がハンドル単品の場合、組み合わせるブレードは、事前に適合性を確認しておくこと。[接続できない、あるいは正常に使用できない場合がある。]
- ・本品はMRI検査室内にて使用しないこと。[ハンドルに磁性金属材料が使用されているので、強力な磁場により勢いよく引きつけられるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

2. 有効期間

- ・包装の使用期限欄を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン

大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造業者

フレキシケア メディカル社

(Flexicare Medical Ltd.)

イギリス

—製造販売元—



株式会社 インターメド ジャパン