

I S 酸素投与キット (I S エコライトエアロゾルマスク)

再使用禁止

ISF0030

【警告】

- ・使用前に接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が機密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]

<有効期間>

包装の使用期限欄を参照[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社インターメドジャパン
大阪市中央区道修町1-6-7 TEL:06-6222-1951

■外国製造所

インターサージカル社 (Intersurgical Limited) 英国

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・再使用禁止
- ・本品は火気のある場所で使用したり、油又はグリス等発火のおそれのあるものを近付けて使用しないこと。[火災、爆発による火傷のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料

マスクの装着部は熱可塑性エラストマー製である。

3. 種類

サイズ
小児用
成人用

4. 原理

マスク本体の周縁部を患者の顔にあてることにより、水粒子を含む空気・酸素ガスを患者の気道に供給するための通路として機能する。

【使用目的又は効果】

本品は、酸素供給に用いる器具のキットである。

【使用方法等】

1. ネブライザシステムをマスク本体の広口コネクタに押しひねりながら接続する。必要に応じて間に蛇管を取り付ける。
2. 適切な酸素流量となるようにフローメータを設定する。
3. しっかり接続されていることを確認する。
4. マスクが患者の鼻と口を覆うようにして当て、ストラップを耳の上から首の周りに掛ける。成人用は耳の下から掛けることも可能である。
5. ストラップの両端をそっと引張り、マスクを患者の顔に固定する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

—製造販売元—

 株式会社 インターメド ジャパン