


歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材(34811000)
プランメカ FotoDent Setup

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

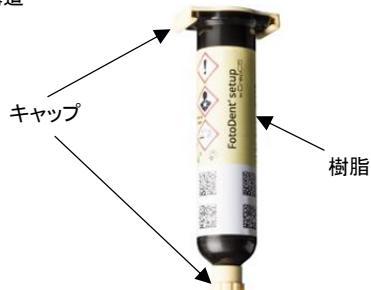

主な原材料:エトキシ化ビスフェノール A ジメタクリレート
色:黄色
使用温度:18℃～28℃

2. 原理

3D プリンタに送信された作製物のデータに従って、本品から放出される樹脂がLEDライトによって硬化し、アライナー作製の歯科模型を製作する。

【使用目的又は効果】

本品はLEDライトにより硬化し、3D プリンタによるアライナー作製の歯科模型の製作に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に 5 分間、容器をよく振り、着色料が均一になるよう混ぜる。
2. 上部と下部のキャップを外す。
3. 3D プリンタのホルダーにまず容器の上部を取り付け、その後容器の下部を取り付ける。
4. 3D プリンタの取扱説明書に従い、製作物のデータを読み込ませ、製作を開始する。
5. 材料がなくなったら、新しいカプセルと交換する。

併用する医療機器

販売名:プランメカ Creo C5

一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

届出番号:13B1X00265000205

製造販売業者:株式会社 MIC メディカル

【使用上の注意】

- ・本品の取扱時にはニトリル手袋、ゴーグル等の保護具を着用し、十分に換気を行うこと。
- ・3D プリンタの取扱説明書をよく読むこと。
- ・気泡がみられる場合には除去すること。
- ・硬化を避けるため、本品の取扱時には直射日光を避け、人工光下でもキャップを締めた状態で保管すること。
- ・本品がこぼれた場合は硬化する前に 96%イソプロピルアルコールまたは 96%エタノールで拭き取ること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温及び直射日光を避け、密封した状態で保管すること。

2. 使用期間

本品に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社 MIC メディカル

TEL:03-6880-9310

製造業者:プランメカ オーワイ(フィンランド)

Planmeca OY

お問い合わせ先:

Planmeca Japan 株式会社

住所:東京都中央区日本橋室町二丁目 3 番 1 号

室町古河三井ビルディング 16 階

TEL:03-6665-0095

FAX:03-6665-0096