

2016年2月2日（新様式第1版）

届出番号 13B3X10185000010

歯科材料 9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材（JMDNコード 70908000）

ピンクディスク

【禁忌・禁止】

使用者は必ず保護メガネを着用すること。
最高回転数 10000 回転数範囲を厳守すること。
使用者は、使用方法を熟知した有資格者に限ること。

【使用上の注意】

最高使用回転数 10000rpm 以下を厳守する事。
最高使用回転数超えた場合発熱による焼き付き、破折等の危険があります。使用者は必ず保護メガネを着用し歯科医療有資格者以外は使用しない事

【形状・構造及び原理】

1. 成分

- ① ポリエステル
- ② 酸化カルミニウム（粒度 80 μ ）
- ③ ポリウレタン樹脂

2. 形状

- ① 直径 25mm
- ② 厚さ 0.3mm
- ③ 軸穴径 1.35mm

【使用目的、効能又は効果】

使用目的：歯科技工用の研削材で、主にレジン床や硬質レジン等の形態修正に用いる。

効能又は効果：ディスクの片面にのみ研磨材が付いており、研削の際隣接の金属やレジン歯、陶歯等に影響を与えない。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光、水分、蒸気の暴露を避け、物理的負荷等の外圧のかからない清潔な場所に保管する事。
歯科従事者以外が手を触れないよう適切に管理保管する事

【包装】

1袋 10枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：有限会社イオス

住所：東京都八王子市大船町 660

電話番号：042-668-8625

FAX：042-668-8626

【操作方法又は使用方法等】

本品を、歯科用マンドレルに装着後、歯科技工用回転機器に装着し被研削物にゆっくりと押し付けて、研削、研磨する。