

キープアップペレット

禁忌・禁止

使用期間が30日を超えないこと

【形状、構造及び原理】

本品は、透明の粒状樹脂である。

ハードとソフトが有る

原材料

ポリエチレン・酢酸ビニル共重合物

物理的特性

<ハード>

密度	0.936 cm ³
引張強さ	6N/mm ²
破断点伸び	770%
弾性率	20N/mm ²
ピカット軟化温度	40°C以上
融点	78°C
硬さ	85

<ソフト>

密度	0.934 cm ³
引張強さ	4N/mm ²
破断点伸び	730%
弾性率	20N/mm ²
ピカット軟化温度	40°C以上
融点	76°C
硬さ	85

【使用目的、効能又は効果】

本品は歯科用咬合スプリントを作成するために用いる材料である。

ただし、使用期間が30日を超えるものではない。

【使用方法等】

溶解器等を用いて軟化し、歯科用咬合スプリントの補修・補強に用いる。

十分に放冷後、研削材等で形態を整える。

【使用上の注意】

- 本品に用いられた原材料成分又は類似成分のものに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- 使用方法、注意事項を患者に説明し、不具合が生じた場合はただちに調整もしくは製作しなおすこと。
- 本品の作業設備付近には、局所排気装置、排気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、作業により発生する粉及び蒸気を吸引しないこと。
- 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- 本品の研磨作業の際には、粉塵等から目を保護するため、保護メガネを着用すること。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、35°C以下で保管すること。

水分、腐食性薬剤及其の蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及汚染を受けないように保管すること。

歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後の点検は、異物混入などが無い事を確認すること

【包装】

1袋 1Kg 入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：有限会社イオス

住所：東京都八王子市大船町 660

電話番号：042-668-8625

F A X：042-668-8626