

■ 汎用 IT 機器の仕様

① 汎用 PC の仕様

CPU : Intel Core i5 プロセッサ以上
OS : Windows 7 以上
HDD : 250GB 以上
RAM : 4GB 以上

② 外部画像表示モニター (カラーモニター)

解像度 : 1280X1024 ピクセル以上

■ 汎用モバイル IT 機器の仕様

① 汎用モバイルタブレットの仕様

CPU : 2 コア以上、1 ギガヘルツ以上
OS : iPadOS 10 以上 Android OS 10 以上
SSD : 16GB 以上
RAM : 2GB 以上

② 画像表示部 (カラー)

モニターサイズ : 8 インチ以上
解像度 : 1280X800 ピクセル以上

■ サーバーの仕様

CPU : Intel Xeon E5640 2.7GHz 以上
OS : Microsoft Windows Server 2012 R2 以上
HDD : 2TB 以上
RAM : 8GB 以上

汎用 IT 機器、及び汎用モバイル IT 機器は、いずれも、

- ・電気的安全性は、JIS T 0601-1 又は JIS C 6950-1 又は JIS C 62368-1 に適合すること。
- ・電磁両立性は、CISPR32/CISPR35、又は VCCI に適合すること。

使用方法

汎用 IT 機器の PC については、操作はキーボード及びマウスを使用する。汎用モバイル IT 機器のタブレットについては、指あるいはタブレット用のポインティングデバイスを使用する。

- ① インストール先の機器の電源を入れる
- ② 本プログラムを汎用 IT 機器、及びサーバーにインストールする
- ③ 本プログラムを起動する

■ 操作

- ① サーバー等からデータを取得する
- ② 機能を選択する
- ③ 画像表示等を行う
- ④ 必要に応じて画像の拡大縮小、階調変更、移動等を行う
- ⑤ 結果を保存する

■ 終了

- ① 画面上の終了アイコンをクリックするか、あるいはメニュー項目から終了機能を選択し、本プログラムを終了させる
- ② 必要に応じて電源を切る

詳細な使用方法については、本プログラムの取扱説明書を参照すること。

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムのインストール先の機器付属の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

【使用上の注意】

使用注意

- ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。
- プログラムの同時使用は十分注意すること。

重要な基本的注意

指定された仕様を満たす機器にインストールすること。

【取扱い上の注意】

- ダウンロードした本プログラムの法定表示は、本プログラムの画面で製品情報のボタンをクリックすると表示される。
- 本プログラム製品は、記憶媒体及び梱包箱に標準バーコード (GSI/JAN コード) を表示しております。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

起動時、自己点検プログラムにより正常起動することを確認してから使用すること。

当社あるいは当社認定業者による保守点検事項

リモートメンテナンスによる点検を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社インフィニットジャパン
TEL : 03-6806-0279

製造業者

INFINITT Healthcare Co., Ltd.
株式会社インフィニットジャパン