

IVY ECG患者ケーブル及びリードワイヤ

【形状・構造及び原理等】

本品は、心電計と接続する患者ケーブル及びリードワイヤである。カラーコードはAHA（USA仕様）、IEC（EU仕様）の2タイプがある。

外観写真（代表例）

4極 ECG 患者ケーブル, 1.5m

ユニバーサル仕様（AHA と IEC、どちらのリードワイヤに対しても使用することが可能です。）



リードワイヤ(X線透過型), 50cm・1m
AHA (USA仕様)



リードワイヤ(X線透過型), 50cm・1m
IEC (EU仕様)



【使用目的又は効果】


本品は、患者の心電図信号を心電計へ伝達するために使用する。

【使用方法等】

以下の手順により心電計及びECG電極に接続し使用する。

1. 各電極部位の準備をし、電極を装着する。
2. 心電計のECG入力に4極ECG患者ケーブルを接続する。
3. 4極ECG患者ケーブルにリードワイヤを接続する。
4. 下に示すように、リードワイヤを電極に取り付ける。

[リード配置]

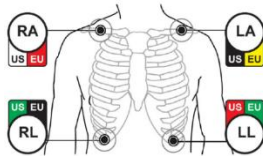

【リードワイヤ(患者リード線)のカラーコード比較表】

誘導の型	AHA(USA仕様)	IEC(EU仕様)
RA-右腕	白	赤
RL-右足	緑	黒
LL-左足	赤	緑
LA-左腕	黒	黄色

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 熟練した者以外は本品を使用しないこと。
- (2) 使用する前には次の事項に注意すること。
 - ・すべてのコードの接続が正確かつ完全であることを確認すること。
 - ・患者に直接接続する外部回路を再点検すること。
 - ・測定中の装置移動も考慮に入れて、ケーブル類の配置を確認すること。
- (3) 使用中は次の事項に注意すること。
 - ・治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
 - ・本品及び患者に異常のないよう絶えず監視すること。
 - ・本品及び患者に異常が発見された場合（本品からの発煙など）には、患者に安全な状態で本体の作動を止めるなど適切な措置を構ずること。
 - ・患者がふれることのないように注意すること。
 - ・ペースメーカーの患者は厳密な監視をすること。
- (4) 使用後次の事項に注意すること。
 - ・コード類の取り外しに際しては、コードを持って引き抜くなど、無理な力をかけないこと。
 - ・清掃したのち、整理してまとめておくこと。
- (5) 改造しないこと。
- (6) 本品を廃棄する際には、健康、安全及び環境保全に関する地方、国の法令に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

[総販売元]

株式会社クロノスメディカルデバイス

〒136-0071

東京都江東区亀戸2-22-17

日本生命亀戸ビル4階

TEL：03-6807-0811

[外国製造業者]

アイビーバイオメディカルシステムズ株式会社（アメリカ）

IVY Biomedical Systems, Inc.