


メッドランセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止[感染の恐れがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

本品は、ボタンを押して自動的に射出する採血用穿刺器具に装着されるもの(ツイスト)と、保護容器内に穿刺用針を格納している構造となっていて、ボタンを皮膚に押し当てると穿刺用針が射出するもの(メジョ、レディ)がある。どちらもボタンを押して穿刺用針を射出し、指先に穿刺して使用する。なお、本品は、電子線滅菌済みの単回使用機器である。

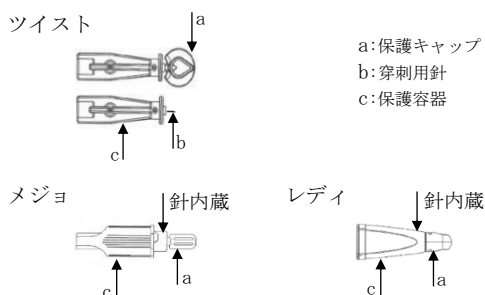

| 構成品名 | 呼称 | 色 |
|------|-----|------|
| ツイスト | 26G | 淡青 |
| | 28G | 透明淡青 |
| | 30G | 青 |
| | 33G | 濃青 |
| メジョ | 21G | 緑 |
| | 23G | 濃青 |
| | 26G | 黄 |
| | 28G | 橙 |
| レディ | 30G | 紫 |
| | 21G | 緑 |
| | 23G | 濃青 |
| | 26G | 黄 |
| | 28G | 橙 |
| | 30G | 紫 |

原材料

針：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

血液検査の為、少量の血液検体を指先の血管から採取すること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ①手指を洗浄し、清潔にします。
- ②採血しやすくするために、指先をマッサージしたり、圧迫したりします。

2. 使用方法

<ツイスト>

- ①採血用穿刺器具のカバーを外し、ランセットを装着します。
- ②保護キャップをねじ切り、取り去ります。
- ③採血用穿刺器具のカバーを戻し、採血用穿刺器具の設定をします。
- ④穿刺する箇所に採血用穿刺器具の先端部分を固定し、採血用穿刺器具のボタンを押して、穿刺用針を皮膚に穿刺します。
- ⑤穿刺した箇所から血液を採取し、皮膚に残っている血液を、清潔な乾いた柔らかいティッシュやコットンボール

等でふき取ります。

<メジョ、レディ>

- ①保護キャップを引っ張らず、本品からねじり切ります。
- ②穿刺する箇所に本品を固定し、「パチン」という音がするまでボタンを皮膚に押し付けると、保護容器内に蔵された針が飛び出し、皮膚を穿刺します。
- ③穿刺した箇所から血液を採取し、皮膚に残っている血液を、清潔な乾いた柔らかいティッシュやコットンボール等でふき取ります。

3. 使用後

- ①使用済の針は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. ツイストは、採血用穿刺器具への装着は奥まで確実に差し込んで下さい。
2. 針刺し損傷を防ぐために、保護キャップを保護容器に戻さないでください。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
3. 使用時は、針刺し事故には十分に注意してください。
4. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となる恐れがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があるため。]
5. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
・脱水状態・ショック状態・末梢循環障害
6. 穿刺時にホルダーが採血部位から離れると、必要な採血量が得られない場合があります。採血時は「パチン」と作動音がするまでホルダーを採血部位から離さないでください。
7. 一度ボタンを押してしまうと、針は射出できません。
8. 保護キャップが外れている場合は使用しないでください。
9. 子供の手の届かない場所に保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

2. 有効期間

使用期限は、化粧箱に記載。

[自己認証(当社データ)による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者

ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町14番7号

電話番号：03-5614-2759

製造業者

Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.

(中国)

販売業者

株式会社CJ(ケアライフ・ジャパン)

東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル

4F

電話番号：03-6661-6169