

器具器械 58 整形用器具器械
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：ロッキングスクリュードライバー

【警告】

本品は未滅菌であるので、使用前に必ず滅菌を行うこと。使用後は必ず洗浄を行い、清潔に保管すること。

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用方法は本品の破損を招く恐れがあるため。]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。[振動・切削・打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障の原因となるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



材質：ステンレス鋼

2. 原理等

手動で骨折部位に髄内釘（販売名：アレクサネイル（滅菌）、承認番号：21800BZY10059000）を挿入するための専用器械である。骨への適切な穴あけ、インプラントのサイズ測定及び固定を行う。

【使用目的又は効果】

骨接合手術等の骨手術に用いる手術機械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

本品は未滅菌であるため、使用に際しては必ず滅菌を行うこと。滅菌方法は高圧蒸気滅菌が推奨される。

【使用上の注意】

1. 警告

本品は、適切な方法による滅菌を施して使用すること。

2. 相互作用

接触凝固での使用禁止

接触凝固等、電気メス先を本品に直接接触させて使用すると、感電・火傷の原因になることがあるので、絶対にしないこと。

3. 不具合・有害事象

化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品にさらすと、腐食による損傷の原因となることがあるため、絶対に避けること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品使用前に、損傷、摩耗、丸み、錆び、そり、機能不良等がないことを確認すること。
2. 本品の使用前には、必ず滅菌を施すこと。
3. 本品の使用後には、必ず洗浄・乾燥し清潔に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

* [製造販売元・製造元]

名 称：株式会社イーピーメディック

住 所：〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 5-8-38

電話番号：092-408-6811

[製造元]

名称：西島メディカル株式会社 東郷工場

住所：〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪字百々51-92