

器具器械 58 整形用器具器械
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：中空エレバ ストレート

【警告】

本品は未滅菌であるので、使用前に必ず滅菌を行うこと。使用後は必ず洗浄を行い、清潔に保管すること。

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用方法は本品の破損を招く恐れがあるため。]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。[振動・切削・打刻等により製品を著しく劣化・消耗させ、故障の原因となるため。]

**【形状、構造及び原理等】

1. 外観図



材質：ステンレス鋼

製品名	中空	幅
中空エレバ ストレート	2.0	S
		W
	2.4	S
		W
	3.0	S
		W

2. 原理等

手動で骨折部位の整復を行う器械である。

【使用目的又は効果】

本品は、主として整形外科で骨接合手術等の骨手術に用いる手術機械である。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

本品は未滅菌品であるため、使用に際しては必ず滅菌を行うこと。

滅菌方法は高圧蒸気滅菌が推奨される。

【使用上の注意】

1. 警告

本品は、適切な方法による滅菌を施して使用すること。

2. 相互作用

接触凝固での使用禁止

接触凝固等、電気メス先を本品に直接接触させて使用すると、感電・火傷の原因になることがあるので、絶対にしないこと。

3. 不具合・有害事象

化学薬品の使用禁止

本品を化学薬品にさらすと、腐食による損傷の原因となることがあるため、絶対に避けること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品使用前に、損傷、摩耗、丸み、錆び、そり、機能不良等がないことを確認すること。
2. 本品の使用前には、必ず滅菌を施すこと。
3. 本品の使用後には、必ず洗浄・乾燥し清潔に保管すること。
4. 本品は中空部を有するため、入念に洗浄を行うこと。また、洗浄後の製品に異物がないことを十分に確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* [製造販売元・製造元]

名 称：株式会社イーピーメディック

住 所：〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 5-8-38

電話番号：092-408-6811