

再使用禁止

滅菌綿棒 R

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

紙軸の片側先端にレーヨン巻綿棒を巻きつけた綿棒である。
（滅菌済み）



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※ 製造販売元：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社

※ 問い合わせ先：アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-1874-86
受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造元：平和メディック株式会社

【使用目的又は効果】

本品は検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

綿球部分を汚染しないように包装より取り出し、綿球部分で検体を採取する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押したりして綿棒の軸を折らないよう注意すること。
2. 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。

＜その他の注意＞

1. 開封後は速やかに使用すること。
2. 本品を使用後は滅菌処理をしてから廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：室温保管

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて清潔な場所に保管すること。

使用期限：外箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

—— 販売元 ——

 **富士製薬工業株式会社**
富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地

 **株式会社 三和化学研究所**
S K K 名古屋市中区東外堀町35番地 〒461-8631

販売元

—— 製造販売元 ——

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
千葉県松戸市松飛台357