

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材（34811000）

IPS ナチュラル ダイマテリアル

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用光照射器により重合する高分子材料で、支台歯の色調を再現した作業用模型に用いる。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent 株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）

〔種類（色調）〕

ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6, ND7, ND8, ND9

〔付属品〕

セパレーター

IPS コンデンサー

IPS ダイホルダー

ユニバーサルホルダー

シェードガイド

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- 1.シェードガイドから色調を選択します。
- 2.セラミック修復物の内側をユニバーサルホルダーに装着したブラシを使用し、セパレーターでコーティングし、少しの間静置します。
- 3.ユニバーサルホルダーにIPS コンデンサーを装着し、本品を修復物の内側に充填し、IPS ダイホルダーを挿入します。
- 4.修復物のマージン部まで隙間がなくなるように本品を再度充填します。
- 5.光重合器で重合します。
- 6.重合後、補綴物のマージン付近を補綴用材料に影響を与えないやわらかいシリコンポリマー等で切削し、マージン部を出します。
- 7.築盛前に流水またはスチーマーを用いて補綴物及び本品を清掃します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。
- ・本品の使用により発疹等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。