

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70907000)

ナイロンブラシは再使用禁止


オプトラファイン

*【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。
ナイロンブラシは再使用しないこと[単回使用のため]。

【形状・構造及び原理等】

本品は、下記(1)～(3)の3種類の形状にそれぞれダイヤモンドフィニッシャー(F)とダイヤモンドポリッシャー(P)があり、専用の研磨材(HPペースト)とナイロンブラシで構成される。

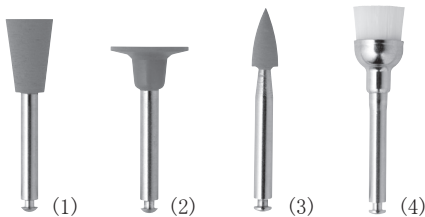

- (1)カップ (Cup)
- (2)ディスク (Disc)
- (3)フレイム (Flame)
- (4)HPナイロンブラシ (Nylon brush)

[原理]

シャフト部分をハンドピースに接続し、歯科補綴物を研磨する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

*【使用方法等】

- 1.使用前に134℃オートクレーブで5分間滅菌し、10分乾燥する。
- 2.修復物の形状にあわせた適切な形状の本品を選択する。ダイヤモンドフィニッシャー(F)で修復物表面を滑らかにし、続いてダイヤモンドポリッシャー(P)で光沢を出す。
 - ウォータースプレー付きのハンドピースにシャフト部分を挿入し、きちんと接続したことを確認する。
 - 最大15,000rpmで歯科補綴物を研磨する。中程度の圧をかけ、50ml/分以上で注水しながら使用すること。この時、研磨ペーストは使用しないこと。
- 3.HPペーストを塗布したHPナイロンブラシで注水せずに、5,000～7,000rpmで最終研磨する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋を用いて、直接本品に触れないようにすること。
- ・本品の使用時、術者は保護メガネおよびマスクを着用し、粉塵を吸い込まないように注意すること。

【使用上の注意】

[使用注意]

本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

[重要な基本的注意]

- ・損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染、錆)等のあるものは、使用しないこと。
- ・曲げ、切削等の形態変更(改造)は破損等の原因となるので行わないこと。
- ・本品は記載の回転数で使用し、本品が過熱しないように注意すること。

- *・ウォッシャー・ディスインフェクターで最大1時間消毒すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent 株式会社

電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

*[製造元]

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン 侯国)