

歯科材料 3 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン（70832000）

S R イボレン

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- (1)粉末：淡黄色の粉末（メタクリル酸エステルポリマー）
- (2)液：無色透明の液（メタクリル酸エステルモノマー）

【付属品】

- ・計量スプーン（粉末用）
- ・計量カップ（液用）
- ・ミキシングジャー

【使用目的又は効果】

粉末及び液体の常温重合レジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いる。

【使用方法等】

- 1.粉末と液を下記の混液比を基準として、ミキシングジャーに入れ、カップに付着しなくなるまで練和する。
粉末：22g（計量スプーンすり切り一杯）
液：6mL
- 2.練和開始から約9分で重合するので、5分以内に石膏模型に圧接すること。
- 3.硬化後、削合・研磨によって辺縁を切り取る。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1.窩洞内に注入しないこと。
- 2.アルギン酸塩印象材や寒天印象材には適さない。
- 3.液体を廃棄する場合は、環境汚染を防ぐため、流しに流さないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1.本品又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症がある術者は直接触れないようにし、誤って触れた場合はすぐに大量の流水で洗浄し、医師の診断を受けること。
- 2.本品又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
- 3.液又は液と粉末との混合物は、直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿などで拭いた後、流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 4.粉末を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 5.液には引火性があるので、本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- 6.本品を使用する際には、蒸気を吸い込まないように、適切な換気がされている場所で室温にて使用すること。

- 7.本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光が当たる場所など）に放置しないこと。
- 8.本品の容器の蓋を開いたままにしておかないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 1.火気厳禁で直射日光が当たらない場所に室温で保管すること。
- 2.換気が良く、涼しい暗所に保管すること。
- 3.同一の保管場所に大量に保管しないこと。使用及び保管場所には消火器を備えること。

【使用期限】

- 1.外装に記載（製造元データによる自己認証）。
- 2.本品は外装に記載の使用期限までに使用し、使用期限切れの本品は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp

*【製造業者】

Ivoclar Vivadent AG (リヒテンシュタイン候国)