

* 機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器（70680000）

キャビフィル インジェクター

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔原理〕

歯科充填用コンポジットレジン等のキャビフィルを本品にセットし、ハンドルを引くことにより材料を押し出す。

*【使用目的又は効果】

歯科用充填材等の歯科材料を歯牙に充填、塗布するために用いる器具。

【使用方法等】

- 1.使用前に本品を134℃のオートクレーブで20分間滅菌する。
- 2.本品の先端にキャビフィルをセットする。
- 3.ハンドルを引いて、キャビフィル内の材料を練板等に押し出すか、直接窩洞に塗布する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・感染を防止するため、グローブやゴーグルを使用する。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・自動洗浄機を使用して洗浄する。
- ・オートクレーブ滅菌前に大きな残渣を除去し、その後ソフトブラシを使用し流水下で洗浄する。
- ・市販のアルデヒド非含有のアルカリ溶液に15分間つけ、適宜消毒する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp

〔製造元〕

Ivoclar Vivadent AG（リヒテンシュタイン侯国）